

**Bitte lesen Sie die gesamte Packungsbeilage sorgfältig durch: Sie enthält wichtige Informationen für den Anwender. Dieses Medizinprodukt ist nicht rezeptpflichtig. Dennoch muss es entsprechend der beschriebenen Anweisungen angewendet werden, um die bestmögliche Wirkung zu erzielen.**

- **Bewahren Sie diese Packungsbeilage auf, um später noch einmal darin nachlesen zu können.**
- **Fragen Sie Ihren Arzt und/oder Apotheker, wenn Sie weitere Informationen oder einen Rat benötigen.**
- **Wenn Ihre Symptome nach längerer Zeit fortbestehen, suchen Sie einen Arzt auf.**

# **Cikatrídina®**

HYALURONSÄURE NATRIUMSALZ 5 mg

## **Vaginalzäpfchen**

### **ZUSAMMENSETZUNG**

Hyaluronsäure Natriumsalz 5 mg, Centella asiatica Extrakt fettlöslich, Calendula Extrakt fettlöslich, Aloe Vera Extrakt fettlöslich, Melaleuca ätherisches Öl, halbsynthetische Glyceride, BHT.

### **DARREICHUNGSFORM**

CIKATRIDINA® liegt in Form von Zäpfchen für die Vaginalanwendung vor. Die Packung enthält 10 Vaginalzäpfchen mit je 2 g e.

### **WAS CIKATRIDINA® IST UND WOFÜR ES ANGEWENDET WIRD**

CIKATRIDINA® Vaginalzäpfchen entfalten ihre Wirkung aufgrund der enthaltenen Hyaluronsäure, einem Mucopolysaccharid, das in vielerlei Geweben des menschlichen Körpers vorkommt. Die Hyaluronsäure wirkt als strukturelle Stütze, ernährt das Gewebe und verleiht ihm Spannkraft und Elastizität. Zahlreiche klinische Studien haben nachgewiesen, dass Hyaluronsäure den Prozess der Re-Epithelialisierung und Geweberegeneration beschleunigt und verbessert.

### **ANWENDUNGSGEBIETE**

Unterstützende Behandlung bei der Regeneration des Vaginalepithels bei Atrophie (Gewebschwund) und Dystrophie (Fehlversorgung des Gewebes). Fördert die Wundheilung nach Geburten, nach gynäkologischen Eingriffen, bei Dystrophien in Folge einer Chemotherapie, ionisierender Bestrahlung, bei vaginaler Trockenheit, auch aufgrund von Östrogenmangel.

### **WANN CIKATRIDINA® NICHT ANGEWENDET WERDEN DARF**

Bekannte Überempfindlichkeit gegenüber einer der Komponenten des Produkts.

### *Schwangerschaft und Stillzeit*

Über die Sicherheit der Verwendung von CIKATRIDINA® Vaginalzäpfchen während der Schwangerschaft und Stillzeit liegen keine Daten vor. Bitte konsultieren Sie in diesen Fällen Ihren Arzt.


*Auswirkungen auf die Fahrtüchtigkeit und die Bedienung von Geräten oder Maschinen*  
Keine speziellen Vorsichtsmaßnahmen erforderlich.

## WECHSELWIRKUNGEN MIT ANDEREN PRODUKTEN

Es sind keine Wechselwirkungen mit anderen Produkten bekannt, daher ist es ratsam, Ihren Arzt zu konsultieren, bevor Sie CIKATRIDINA® Vaginalzäpfchen in Verbindung mit anderen Medizinprodukten oder Medikamenten für die Vaginalanwendung verwenden.

## ART DER ANWENDUNG

Zum Herausnehmen des Vaginalzäpfchens aus dem Behältnis die oberen Enden der beiden Blisterhälften auseinanderziehen. Tief in die Scheide einführen. Aus hygienischen Gründen vor und nach Anwendung des Medizinprodukts die Hände waschen.

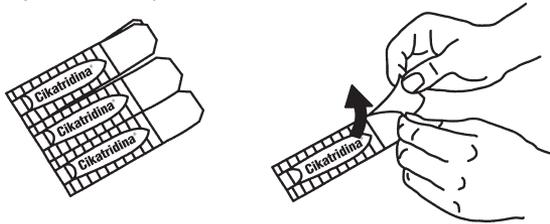

## ZEITPUNKT UND DAUER DER ANWENDUNG

1 Vaginalzäpfchen abends oder nach ärztlicher Verordnung. Die Anwendungsdauer hängt von der Entwicklung der Symptome ab. Bei Bedarf können CIKATRIDINA® Vaginalzäpfchen über längere Zeiträume verwendet werden.

## UNERWÜNSCHTE WIRKUNGEN

Die Anwendung von lokal angewendeten Produkten, speziell über einen längeren Zeitraum, kann Überempfindlichkeitsreaktionen hervorrufen. Brechen Sie in diesem Fall die Behandlung ab und suchen Sie einen Arzt für eine entsprechende Behandlung auf. Wenn unerwünschte Wirkungen auftreten, die nicht in dieser Packungsbeilage beschrieben sind, informieren Sie Ihren Arzt oder Apotheker.

## WARNHINWEISE

Das Produkt von Kindern fernhalten. Augenkontakt vermeiden. Nicht schlucken.

## HALTBARKEIT UND LAGERUNG

Das Verfallsdatum befindet sich auf der Packung (EXP) und bezieht sich auf das Produkt in der ungeöffneten und richtig gelagerten Verpackung. Nicht über das auf der Packung angegebene Verfallsdatum hinaus verwenden. Nicht verwenden, wenn die Packung geöffnet oder beschädigt ist. Das Medizinprodukt gut verschlossen, licht- und wärme geschützt, am besten bei Temperaturen zwischen 4 °C und 25 °C lagern.

MEDIZINPRODUKT  0373

 Hersteller:

FARMA-DERMA s.r.l.

Via dei Bersaglieri, 10 - 40010 Sala Bolognese (BO) ITALIEN (ITALY)

Vertrieb:

CSC Pharmaceuticals Handels GmbH

Gewerbestraße 18-20, A-2102 Bisamberg