

ULTRA Benetzungstropfen für die Augen

Gebrauchsanweisung

Diese Gebrauchsanweisung enthält wichtige Informationen zur Anwendung und Sicherheit des Produktes. Bitte lesen Sie die Informationen sorgfältig durch und bewahren Sie sie auf, um sie später noch einmal nachlesen zu können.

Produktbezeichnung

SYSTANE™ ULTRA Benetzungstropfen für die Augen

Beschreibung

SYSTANE™ ULTRA Benetzungstropfen für die Augen sind eine sterile Lösung, die Polyethylenglykol 400, Propylenglykol, Hydroxypropyl-Guar, Sorbitol, Aminomethylpropanol, Borsäure, Kaliumchlorid, Natriumchlorid, das Konservierungsmittel POLYQUAD™ (Polidroniumchlorid) 0,001% und gereinigtes Wasser enthält. Zur Einstellung des pH-Wertes können Salzsäure und/oder Natriumhydroxid enthalten sein.

Klinischer Nutzen

SYSTANE™ ULTRA Benetzungstropfen für die Augen befeuchten die Augenoberfläche, um Symptome trockener Augen zu reduzieren. Sie schützen die Augenoberfläche und verbessern die Sehfähigkeit. Außerdem lindern SYSTANE™ ULTRA Benetzungstropfen für die Augen vorübergehend die Trockenheit, die beim Tragen von Kontaktlinsen entstehen kann.

Verwendungszweck

SYSTANE™ ULTRA Benetzungstropfen für die Augen dienen zur Befeuchtung der Augenoberfläche und zur Nachbenetzung weicher Kontaktlinsen (einschließlich Silikon-Hydrogel-Kontaktlinsen).

Vorgesehene Anwender

Erwachsene (ab 18 Jahre) mit Symptomen trockener Augen, einschließlich Kontaktlinsenträger, die in der Lage sind, die Gebrauchsanweisung zu verstehen und zu befolgen (oder eine Betreuungsperson haben, die dies für sie übernimmt).

Anwendungsgebiete

SYSTANE™ ULTRA Benetzungstropfen für die Augen werden angewendet zur vorübergehenden Linderung der Symptome trockener Augen wie Brennen und Reizungen.


Leistungsmerkmale

Die gesammelten Nachweise aus klinischen Studien, veröffentlichter klinischer Fachliteratur und Erfahrungen nach der Markteinführung zeigen, dass SYSTANE™ ULTRA Benetzungstropfen für die Augen ihre Zweckbestimmung erfüllen. Sie lindern vorübergehend die Symptome trockener Augen wie Brennen und Reizungen.

Anwendungshinweise

- Waschen Sie Ihre Hände vor der Anwendung von Augentropfen.
- **Vor Gebrauch gut schütteln.**
- SYSTANE™ ULTRA Benetzungstropfen für die Augen können nach Bedarf mehrmals täglich angewendet werden, um die Symptome des trockenen Auges zu lindern.
- Öffnen Sie die Flasche, ohne die Tropferspitze zu berühren.
- Halten Sie die Flasche zwischen Daumen und Mittelfinger mit der Öffnung nach unten.
- Geben Sie 1 oder 2 Tropfen in das betroffene Auge oder in beide Augen und blinzeln Sie.
- Wenn es während des Tragens von Kontaktlinsen zu leichten Reizungen, Tragekomfortstörungen oder verschwommenem Sehen kommt, geben Sie 1 oder 2 Tropfen in das betroffene Auge oder in beide Augen und blinzeln Sie 2 bis 3 Mal.

Siehe die Anleitung unten.

	Kopf leicht nach hinten neigen, Blick nach oben richten und mit dem Zeigefinger das Unterlid wegziehen.
	Durch leichten Druck auf den Flaschenboden der DROPTAINER™-Flasche Tropfen von oben in den Bindehautsack des Auges eintropfen, ohne dass die Flaschenspitze mit dem Auge oder Lidrand in Berührung kommt.

Gegenanzeigen (Gründe gegen eine Anwendung)




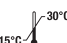

Wenn Sie allergisch gegen einen der Inhaltsstoffe von SYSTANE™ ULTRA Benetzungstropfen für die Augen sind, sollten Sie dieses Produkt nicht verwenden.

Warnhinweise

Es ist wichtig, dass Sie die Anweisungen Ihres Augenspezialisten oder Fachberaters und die Hinweise zur korrekten Anwendung des Produktes in der Gebrauchsanweisung beachten. Wenn es bei Ihnen zu anhaltenden Augenbeschwerden, übermäßigem Tränenfluss, Sehveränderungen oder Augenrötung kommt, beenden Sie die Anwendung von SYSTANE™ ULTRA Benetzungstropfen für die Augen und suchen Sie Ihren Augenspezialisten oder Fachberater auf, da sich diese Beschwerden verschlimmern könnten. Reinigen oder desinfizieren Sie Ihre Kontaktlinsen nicht mit SYSTANE™ ULTRA Benetzungstropfen für die Augen, da es zu Augenreizungen kommen kann.

Vorübergehendes verschwommenes Sehen und andere Seheinschränkungen können Ihre Verkehrstüchtigkeit oder die Fähigkeit zum Bedienen von Maschinen beeinträchtigen. Wenn Sie nach dem Eintropfen verschwommen sehen, dürfen Sie erst wieder am Straßenverkehr teilnehmen oder Maschinen bedienen, wenn diese Beeinträchtigung abgeklungen ist.

Vorsichtsmaßnahmen

- Darf nur am Auge verwendet werden.
- ANBRUCHSCHUTZ: Nicht verwenden, wenn die Versiegelung der Verschlusskappe beschädigt ist oder fehlt oder die Verschlusskappe beschädigt ist.
- Nach dem ersten Öffnen der Verschlusskappe ist der Anbruchschutzring lose. Entfernen Sie diesen vor der ersten Anwendung am Auge.
- Nicht verwenden, wenn die Packung oder die Flasche (Sterilverpackung) beschädigt ist. 
- Vermeiden Sie Berührungen der Tropferspitze der Flasche mit Oberflächen, um Verunreinigungen zu verhindern.
- Suchen Sie bei Verschlucken des Produktes einen Arzt auf.
- Sie dürfen das Produkt nicht verwenden, wenn die Lösung verfärbt oder trüb ist.
- Nach Gebrauch Flasche wieder verschließen.
- Flasche bei Nichtgebrauch stets fest verschlossen halten.
- Borsäure kann möglicherweise reproduktionstoxisch sein. Dieses Produkt enthält Borsäure in einer Menge, die unbedenklich ist, wenn das Produkt gemäß Gebrauchsanweisung angewendet wird.
- Vor dem auf der Packung und Flasche angegebenen Verfalldatum verwenden. 
- Entsorgen Sie Restmengen der Lösung 6 Monate nach Anbruch der Flasche. 
- Zwischen 15 °C und 30 °C aufbewahren. 
- Für Kinder unzugänglich aufbewahren. 

Restrisiken und unerwünschte Nebenwirkungen

Mögliche Restrisiken und/oder unerwünschte Nebenwirkungen von SYSTANE™ ULTRA Benetzungstropfen für die Augen umfassen: Allergische Reaktion/Überempfindlichkeit, verschwommenes Sehen, vermindertes Sehvermögen (vorübergehend und dauerhaft), Magen-Darm-Beschwerden, Entzündungen, Reizungen, mikrobielle Infektionen, systemische Toxizität und Toxizitätsreaktion.

Wenn es zu anhaltenden Augenbeschwerden, übermäßigem Tränenfluss, Sehveränderungen oder Augenrötung kommt, beenden Sie die Anwendung von SYSTANE™ ULTRA Benetzungstropfen für die Augen und suchen Sie Ihren Augenspezialisten oder Fachberater auf, da sich die Beschwerden verschlimmern könnten.

Meldung schwerwiegender

Vorkommnisse

Melden Sie **alle** schwerwiegenden Vorkommnisse im Zusammenhang mit der Anwendung dieses Produktes an Alcon Laboratories, Inc.:

Kontaktieren Sie die lokale Alcon Niederlassung oder Ihren Alcon Vertriebshändler.

E-Mail: qa.complaints@alcon.com

Melden Sie schwerwiegende Vorkommnisse auch an die für Medizinprodukte zuständige Behörde in Ihrem Land.







Packungsgrößen

SYSTANE™ ULTRA Benetzungstropfen für die Augen sind in Kunststoffflaschen mit 10 ml Füllvolumen erhältlich.

Packungsgrößen: 10 ml, 3 x 10 ml

STERILE A Steril durch Anwendung aseptischer Verfahrenstechniken.

Erläuterung der Symbole

Symbol	Definition
	Achtung
	Gebrauchsanweisung beachten oder elektronische Gebrauchsanweisung beachten.
	Nicht verwenden, wenn die Verpackung beschädigt ist, und Gebrauchsanweisung beachten.
	Herstellungsdatum
	Enthält gefährliche Substanzen
	Einfaches Sterilbarrieresystem
MD	Medizinprodukt
UDI	Eindeutige Produktidentifizierung

 Hersteller
Alcon Laboratories, Inc.
6201 South Freeway
Fort Worth, Texas 76134-2099, USA

EC REP Bevollmächtigter in der Europäischen Union
Alcon Laboratories Belgium
Lichterveld 3
2870 Puurs-Sint-Amands
Belgien



© 2024 Alcon Inc.

 www.ifu.alcon.com

Stand: 2024-09