

## GEBRAUCHSANWEISUNG

### ZUSAMMENSETZUNG

Butan, Pentan, Isobutan, Propan, Isopropylalkohol, Menthol, Campher. Mit einem angenehmen frischen Duft. Hinweis: Reparil® Ice-Spray Madaus enthält keine künstlichen Duft- oder Aromastoffe.

### ANWENDUNGSGEBIETE:

Zur wirksamen Kühlung von Prellungen, Verstauchungen, Muskelkrämpfen und Blutergüssen. Reparil® Ice-Spray Madaus ist als erste Hilfe besonders für stumpfe Sportverletzungen geeignet. Nicht auf Schleimhäute und offene Wunden auftragen. Reparil® Ice-Spray Madaus darf nicht mit den Augen in Berührung kommen.

### DOSIERUNGSANLEITUNG, ART UND DAUER DER ANWENDUNG:

Reparil® Ice-Spray Madaus aus mindestens 15 cm Entfernung auf die betroffenen Hautpartien sprühen. Bei Bedarf kann Reparil® Ice-Spray Madaus mehrfach angewandt werden. Sprühen Sie nicht länger als fünf Sekunden auf eine Hautpartie (Gefahr von Erfrierungen). Nicht bei Säuglingen und Kindern unter sechs Jahren anwenden.

**Hinweis zur Verwendung:** Um eine einwandfreie Produktqualität und die ordnungsgemäße Funktion dieses Applikationssystems zu gewährleisten, darf an der Sprayflasche keine Manipulation vorgenommen werden.

**Hinweise und Angaben zur Haltbarkeit des Medizinproduktes:** Reparil® Ice-Spray Madaus darf nur bis zu dem auf dem Behältnis mit „verwendbar bis“ bezeichneten Datum verwendet werden. Reparil® Ice-Spray Madaus wird ohne Konservierungsmittel hergestellt und in das Behältnis mit einem speziellen Applikationssystem abgefüllt. Bei bestimmungsgemäßem Gebrauch ist daher eine Konservierung nicht erforderlich.

Stand der Information: Oktober 2020

Behälter steht unter Druck. Vor Sonneneinstrahlung und Temperaturen über 50 °C schützen. Auch nach Gebrauch nicht gewaltsam öffnen oder verbrennen. Nicht in der Nähe von offenem Feuer verwenden und nicht auf glühende Gegenstände sprühen. Von Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen. Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.

Hersteller:

Meda Pharma S.p.A. Via Valosa di Sopra, 9 - 20900 Monza - Italien

Vertrieb in Deutschland:

Viatrix Healthcare GmbH  
Lütticher Straße 5, 53842 Troisdorf

Vertrieb in Österreich:

Mylan Österreich GmbH (A Viatrix Company), Guglgasse 15, 1110 Wien



**LOT** s. Bodenaufdruck



Verwendbar bis:  
s. Bodenaufdruck



s. Bodenaufdruck

15627



VIATRIS

# Reparil® Ice-Spray Madaus



Zur Kühlung bei  
Sportverletzungen

Ohne künstliche  
Duft- und Aromastoffe

Medizinprodukt  
200 ml Lösung zum Aufsprühen auf die Haut



VIATRIS