



Systane®

BENETZUNGSTROPFEN
FÜR DIE AUGEN

Bitte lesen Sie diese Gebrauchsinformation sorgfältig durch, und bewahren Sie sie auf, um sie später noch einmal nachlesen zu können.

BESCHREIBUNG:

Bei **SYSTANE® Benetzungstropfen für die Augen** handelt es sich um eine sterile Lösung mit folgenden Inhaltsstoffen: Polyethylenglykol 400, Propylenglykol, HYDROXYPROPYL-GUAR, Borsäure, Calciumchlorid, Magnesiumchlorid, Kaliumchlorid, Natriumchlorid, Zinkchlorid und POLYQUAD® (Polidroniumchlorid) 0,001%.

ANWENDUNGSGEBIETE:

SYSTANE® Benetzungstropfen für die Augen sorgen durch Befeuchten der Augenoberfläche für schnelle und langanhaltende Linderung bei Trockenheitsgefühl, Reizung, Brennen, Stechen und Sandkorn- bzw. Fremdkörpergefühl. Diese Beschwerden können durch Umwelteinflüsse wie Staub, Rauch, Ozon, UV-Strahlen, trockene Hitze (Heizung/Sauna), Klimaanlage, Wind, Zugluft und Kosmetika verursacht werden oder entstehen durch eine verzögerte Lidschlagfrequenz, zu dem es bei langem Fernsehen oder konzentrierter Bildschirmarbeit kommt.

GEGENANZEIGEN (Gründe gegen eine Anwendung):

Wenn Sie allergisch gegen einen der Inhaltsstoffe von **SYSTANE® Benetzungstropfen für die Augen** sind, sollten Sie dieses Produkt nicht verwenden.

ANWENDUNGSHINWEISE:


SYSTANE® Benetzungstropfen für die Augen können täglich nach Bedarf angewendet werden. Geben Sie ein bis zwei Tropfen in das betroffene Auge und blinzeln Sie.

WARNHINWEISE:

Es ist wichtig, dass Sie die Anweisungen Ihres Arztes oder Apothekers und die Packungshinweise zur korrekten Anwendung des Produktes beachten. Wenn es zu anhaltenden Augenbeschwerden, übermäßigem Tränenfluss, Sehveränderungen oder Augenrötung kommt, suchen Sie Ihren Arzt oder Apotheker auf, da sich die Beschwerden verschlimmern könnten.

VORSICHTSMASSNAHMEN:

- Vermeiden Sie jedes Berühren der Tropferspitze der Flasche oder deren Kontakt mit Gegenständen, um Verunreinigungen zu verhindern.
- Nach Gebrauch wieder verschließen.
- Bei Raumtemperatur aufbewahren.
- Flasche bei Nichtgebrauch stets fest verschlossen halten.

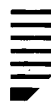



- Vor dem auf Packung und Flasche angegebenen Verfalldatum verwenden. 
- Restmengen der Augentropfen sechs Monate nach Anbruch der Flasche verwerfen.
- Für Kinder unzugänglich aufbewahren.

PACKUNGSGRÖSSEN:

SYSTANE® Benetzungstropfen für die Augen, sind als dampfsterilisierte und sterilfiltrierte Lösung in Plastikflaschen zu 10 ml und 3 x 10 ml erhältlich.

STERILE A

VERTRIEB für Deutschland:

Alcon Pharma GmbH
Blankreutestraße 1
D-79108 Freiburg

VERTRIEB für Österreich:

Alcon Ophthalmika GmbH
Mariahilferstraße 121b
A-1060 Wien

HERSTELLER:

Alcon Laboratories, Inc.
6201 South Freeway
Fort Worth, Texas, USA 76134-2099

EU-BEVOLLMÄCHTIGTER:

Alcon Laboratories (U.K.) Ltd.
Boundary Way
Hemel Hempstead
Hertfordshire
HP2 7UD England

US-Patentnr. 6,403,609



© 2003, 2006 Alcon, Inc.

Haben Sie weitere Fragen?
Informieren Sie sich unter
www.Augen-Forum.de

Alcon®

6-14-033.01

