

## Gebrauchsanweisung

### *Beruhigt und lindert gereizte Augen.*

**Zur besseren Befeuchtung der Augen, insbesondere beim Tragen von harten und weichen Kontaktlinsen**

# Herba-Vision<sup>®</sup> Augentrost sine (Euphrasia)

mit Hyaluronat

20 x 0,4 ml Augentropfen  
5 x 0,4 ml Augentropfen

#### Was ist Herba-Vision<sup>®</sup> Augentrost sine?

Herba-Vision<sup>®</sup> Augentrost sine ist eine konservierungsmittelfreie sterile Lösung zum Befeuchten und Benetzen der Augen mit der körpereigenen, benetzenden Substanz Natrium-Hyaluronat und mit Augentrosttinktur (Euphrasiatinktur).

Herba-Vision<sup>®</sup> Augentrost sine kann auch während des Tragens von Kontaktlinsen angewendet werden.

#### Zusammensetzung:

Natrium-Hyaluronat (0,05%), Augentrosttinktur (0,05%), Natriumdihydrogenphosphat Dihydrat, Dinatriumhydrogenphosphat Dodecahydrat, Natriumchlorid, HPMC (0,25%, Methocel<sup>®</sup>), gereinigtes Wasser

#### Herba-Vision<sup>®</sup> Augentrost sine kann bei folgenden

##### Indikationen verwendet werden:

Herba-Vision<sup>®</sup> Augentrost sine Augentropfen bringen Linderung und beruhigen bei gereizten oder trockenen Augen, verursacht durch das Tragen von Kontaktlinsen, Müdigkeit, den Aufenthalt in verrauchten Räumen, langandauernde Computerarbeit oder Belastung durch allgemeine Umwelteinflüsse, wie Staubpartikel, Pollen usw.

#### Wann sollte man Herba-Vision<sup>®</sup> Augentrost sine nicht anwenden?

- Herba-Vision<sup>®</sup> Augentrost sine sollte bei einer bekannten Überempfindlichkeit (Allergie) gegen einen der Inhaltsstoffe nicht angewendet werden.

- Bei Patienten mit Hornhautepithelveränderungen sollte Herba-Vision<sup>®</sup> Augentrost sine nicht angewendet werden.

#### Für wen ist Herba-Vision<sup>®</sup> Augentrost sine geeignet?

Geeignet zur Anwendung bei Jugendlichen und Erwachsenen.

Schwangere, stillende Frauen und Kleinkinder sollten vor der Anwendung von Herba-Vision<sup>®</sup> Augentrost sine Ihren behandelnden Arzt konsultieren.

#### Welche Nebenwirkungen können bei der Anwendung von Herba-Vision<sup>®</sup> Augentrost sine auftreten?

Folgende Nebenwirkungen sind für Herba-Vision<sup>®</sup> Augentrost sine bekannt:

- Nach der Anwendung kann vorübergehend eine Beeinträchtigung der Sehschärfe eintreten. In diesem Fall sollte kein Fahrzeug gelenkt und keine Maschine bedient werden. Es empfiehlt sich zu warten, bis die normale Sehschärfe wieder eingetreten ist.
- Unmittelbar nach dem Tropfen können vorübergehende Symptome, z. B. leichtes Brennen der Augen auftreten.

#### Welche Vorsichtsmaßnahmen und Warnhinweise sind zu beachten?

- Hände vor Gebrauch sorgfältig waschen und abtrocknen.
- Im Falle einer Beschädigung des Ein-Dosis-Behältnis nicht verwenden.
- Prüfen Sie vor dem ersten Öffnen, ob das Ein-Dosis-Behältnis unversehrt ist, um Sterilität des Inhalts zu gewährleisten.
- Um Kontamination zu vermeiden, Tropferspitze nicht berühren.
- Achten Sie darauf, das Auge nicht mit dem Ein-Dosis-Behältnis zu berühren, um Verletzungen oder Augeninfektionen zu vermeiden.
- Die Öffnung des Ein-Dosis-Behältnisses darf nicht mit anderen Gegenständen oder Körperteilen berührt werden.
- Eine Ampulle ist nur zur einmaligen Anwendung bestimmt. Um Augeninfektionen zu vermeiden, ein bereits geöffnetes Ein-Dosis-Behältnis nicht wiederverwenden.
- Bitte die Ampulle nach Gebrauch sofort entsorgen.
- Lösung nicht einnehmen.
- Nicht zur alleinigen Behandlung einer Augeninfektion anwenden.

- Herba-Vision® Augentrost sine ist nicht als Aufbewahrungsfliissigkeit von Kontaktlinsen geeignet.
- Bei anhaltenden oder sich verschlechternden Beschwerden einen Facharzt/Spezialisten aufsuchen.
- Herba-Vision® Augentrost sine sollte auBerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahrt werden.
- Nicht nach Überschreiten des Verfallsdatums anwenden.

#### Wie wird Herba-Vision® Augentrost sine angewendet?

Nur für den äußerlichen Gebrauch.

- Zum Öffnen das obere Ende des Ein-Dosis-Behältnisses abdrehen und Inhalt sofort verwenden.
- Ein-Dosis-Behältnis mit der Öffnung nach unten halten und pro Auge je 1–2 Tropfen einträufeln. Durch Lidschlag wird die Lösung verteilt und bildet eine transparente Flüssigkeitsschicht auf der Augenoberfläche.
- Herba-Vision® Augentrost sine kann auch während des Tragens von Kontaktlinsen angewendet werden.

#### Wie oft und wie lange sollte man Herba-Vision® Augentrost sine anwenden?

- Bei Bedarf 1–2 Tropfen in den Bindehautsack eines jeden Auges einträufeln und durch Blinzeln verteilen.
- Wenden Sie Herba-Vision® Augentrost sine nach Bedarf oder nach Anweisung des Arztes an.

Herba-Vision® Augentrost sine ist für eine Daueranwendung geeignet, allerdings sollten Sie – wie bei allen Erkrankungen – bei länger anhaltenden Beschwerden einen Augenarzt um Rat fragen.

Im Falle einer zusätzlichen lokalen Behandlung der Augen sollte zwischen den beiden Anwendungen ein zeitlicher Abstand von ca. 30 Minuten bestehen.

Herba-Vision® Augentrost sine sollte **nach** den anderen Produkten appliziert werden.

#### Folgende Packungsgrößen sind erhältlich:

Augentropfen in 20 x 0,4 ml und 5 x 0,4 ml Ein-Dosis-Behältnissen.

#### Welche Hinweise zur Lagerung und Entsorgung sind zu beachten?

Bei Raumtemperatur lagern. Vor Frost und direkter Sonneneinstrahlung schützen.

Angaben zur Lotnummer und zum Verfallsdatum finden Sie auf jedem Ein-Dosis-Behältnis sowie auf der Faltschachtel.

Herba-Vision® Augentrost sine kann im Hausmüll entsorgt werden.








#### Stand der Gebrauchsinformation: Juli 2023






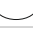

 OmniVision GmbH  
Lindberghstraße 9  
82178 Puchheim  
Deutschland  
Telefon: +49 89 84 07 92-30  
Telefax: +49 89 84 07 92-40  
www.omnivision.de  
E-Mail: info@omnivision.de

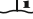

#### Vertrieb Österreich:

OmniVision GmbH  
Anton Anderer Platz 6  
1210 Wien  
Österreich  
Telefon: +43 1 270 70 70  
Telefax: +43 1 270 70 70-20  
www.omnivision.at  
E-Mail: info@omnivision.at

	Hersteller
	Herstellungsdatum
	Verwendbar bis
	Fertigungslosnummer, Charge
	Temperaturbegrenzung
	Vor Sonneneinstrahlung und Hitze schützen
	Gebrauchsanweisung beachten

	Nicht wiederverwenden. Siehe auch unter Vorsichtsmaßnahmen und Warnhinweise.
	Bei beschädigter Verpackung nicht verwenden
	Medizinprodukt
	Produktidentifizierungsnummer
	Sterilisiert mit aseptischen Verfahren
	Einfaches Sterilbarriersystem
	Einfaches Sterilbarriersystem mit äußerer Schutzverpackung