


GEBRAUCHSANWEISUNG		
<b>Produkt: AmmoLa Riechstäbchen</b>		
Version vom 20.03.2024	Seite 1 von 1	
EDV: 2		

### Allgemein

Aromatisierter Ammoniak ist ein farbloser, stechend riechender Stoff, der durch das Einatmen der Dämpfe einen starken Reiz in der Nase ausübt.

### Trainingshilfe


**AmmoLa** Riechstäbchen werden im Rahmen des Fertigkeitstrainings (Skilltrainings) eingesetzt, um im privaten und beruflichen Alltag zurecht zu kommen und erfolgreich zu sein.

### Anwendung

**AmmoLa** Ampulle durch Druck aufbrechen. Die Flüssigkeit wird von der Ummantelung aufgenommen.

Ampulle zum Einatmen kurz unter die Nase halten.

Bei der praktischen Anwendung wird durch Riechen an dem **AmmoLa** Riechstäbchen ein starker Reiz ausgelöst, der die Kontrolle dissoziativer Zustände unterstützt.

 <b>Achtung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Reizt Augen, bei längerem Kontakt auch Atemorgane und Haut. Nur äußerlich anwenden. Nicht in die Augen bringen.</li> <li>• Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.</li> <li>• Nicht verwenden, wenn eine Überempfindlichkeit gegenüber einem der Inhaltsstoffe besteht.</li> <li>• Darf nicht nach Ablauf des Verfallsdatums benutzt werden.</li> </ul>
---	--

### Gebinde

10 Riechampullen aus Glas à 0,4 ml

### Inhaltsstoffe

Isopropanol, gereinigtes Wasser, Ammoniak, Lavendelöl

### Ausgabe

April 2024



WQS ManagementConsultants GmbH, Waterkamp 24a, D-59075 Hamm

Vertrieb: DEVESA Dr. Reingraber GmbH & Co. KG, D-18311 Ribnitz-Damgarten  
Tel. 0 38 21 / 88 90 860

LOT JJJJ X / verwendbar bis MM.JJJJ (5 Jahre)

Medizinprodukt gemäß Richtlinie 93/42/EWG

PZN -06766849

