



Weiche Nasensalbe nach Dr. Bader®

Gebrauchsinformation für den Anwender/die Anwenderin

Bitte sorgfältig durchlesen, bevor Sie dieses Medizinprodukt anwenden.

Bei Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Arzt/Ihre Ärztin oder Apotheker/in.

Apothekenexklusives Medizinprodukt

Klinisch getestet

Weiche Nasensalbe nach Dr. Bader®

Wie ist Weiche Nasensalbe nach Dr. Bader® zusammengesetzt?

100 g Salbe enthalten 30 g Wollwachs (Lanolin), 30 g Sesamöl, 10 g Neutralöl, 30 g gereinigtes Wasser. Ohne Konservierungs- und Farbstoffe!

Was ist Weiche Nasensalbe nach Dr. Bader®?

Weiche Nasensalbe nach Dr. Bader® ist eine Wasser-in-Öl-Emulsion, die auf den vorderen Bereich der Nase aufgetragen wird. Dort befeuchtet die Salbe trockene Nasenhaut und Nasenschleimhaut und verhindert das Austrocknen.

Wie wirkt Weiche Nasensalbe nach Dr. Bader®?

Wollwachs, Sesamöl und Neutralöl bilden die lipophile Basis. Das gereinigte Wasser stellt die hydrophile Phase dar. Die physikalische Wirkungsweise beruht auf der langsamen Freisetzung der hydrophilen Phase aus der lipophilen Phase. Dies führt zu einer kontinuierlichen Befeuchtung der Nasenhaut und Nasenschleimhaut. Darüber hinaus verringern Lanolin und Sesamöl den Wasserverlust und befeuchten die Haut zusätzlich.

Wann wird Weiche Nasensalbe nach Dr. Bader® angewendet?

Weiche Nasensalbe nach Dr. Bader® ist zur Befeuchtung der trockenen Nasenhaut um die Nase herum, sowie der trockenen Nasenschleimhaut im vorderen Bereich der Nase bestimmt.

Wer sollte Weiche Nasensalbe nach Dr. Bader® anwenden?

Weiche Nasensalbe nach Dr. Bader® ist für Personen, die bereits eine trockene Nasenhaut und/oder

Nasenschleimhaut haben oder die ein Austrocknen der Nasenhaut/Nasenschleimhaut verhindern möchten.

Bei Personen mit trockener Nasenschleimhaut durch nasale Sauerstoffzufuhr (z.B. mit CPAP-Maske) bei Schlaf-Apnoe, Sauerstoffmangel.

Bei Personen zur Vorbeugung trockener Nasenschleimhaut aufgrund von trockener Raumluft, besonders in klimatisierten Wohn- und Büroräumen und von trockener Kabinenluft, besonders bei Langzeitflügen.

Zur Unterstützung der Regeneration der Nasenschleimhaut, z.B. durch Erkältung oder durch Nasenbluten hervorgerufen.

Bei Allergikern mit trockener und gereizter Nasenschleimhaut, um die Barrierefunktion der Nasenschleimhaut wieder herzustellen.

Weiche Nasensalbe nach Dr. Bader® ist für Erwachsene und Kinder ab 6 Jahren bestimmt.

Wie wird Weiche Nasensalbe nach Dr. Bader® angewendet?

Erwachsene und Kinder ab 6 Jahre:

Mehrmals täglich einen 0,5 – 1 cm langen Salbenstrang im vorderen Bereich der Nase in jedes Nasenloch mit einem sauberen Finger oder einem Wattestäbchen auftragen und durch sanftes Massieren der Nasenlöcher gleichmäßig verteilen.

Nach jeder Anwendung sollte die Spitze der Tube gründlich gereinigt werden. Aus hygienischen Gründen sollte eine Tube nur von einer Person verwendet werden. Weiche Nasensalbe nach Dr. Bader® kann bis zu 30 aufeinanderfolgende Tage angewendet werden.

Wann darf Weiche Nasensalbe nach Dr. Bader® nicht angewendet werden?

Weiche Nasensalbe nach Dr. Bader® darf nicht angewendet werden:

- Bei Überempfindlichkeit gegen einen oder mehrere der Inhaltsstoffe
- auf verletzter oder frisch operierter Nasenschleimhaut
- bei Kindern unter 6 Jahren
- bei bettlägerigen Patienten sollte nur eine minimale Menge von Weiche Nasensalbe nach Dr. Bader® verwendet werden, um ein Auslaufen in die Atemwege und ein Einatmen des Produktes zu vermeiden



Besondere Warnhinweise und Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung von Weiche Nasensalbe nach Dr. Bader®

Die Anwendung von Weiche Nasensalbe nach Dr. Bader® wird bei Kindern unter 6 Jahren nicht empfohlen.

Weiche Nasensalbe nach Dr. Bader® enthält Wollwachs und Sesamöl.

Weiche Nasensalbe nach Dr. Bader® sollte nach Ablauf des Verfallsdatums nicht mehr verwendet werden. Nach dem ersten Öffnen der Tube sollte sie innerhalb von 3 Monaten aufgebraucht werden.

Wechselwirkungen von Weiche Nasensalbe nach Dr. Bader® mit anderen Medizinprodukten und Arzneimitteln

Es sind keine Wechselwirkungen bekannt.

Anwendung von Weiche Nasensalbe nach Dr. Bader® in Schwangerschaft und Stillzeit

Es sind keine Risiken im Zusammenhang mit der Anwendung während der Schwangerschaft und Stillzeit bekannt.

In Zweifelsfällen fragen Sie Ihren Arzt/Ihre Ärztin oder Apotheker/in.

Welche unerwünschten Nebenwirkungen können bei der Anwendung von Weiche Nasensalbe nach Dr. Bader® auftreten?

Wollwachs kann lokale Hautreaktionen (z. B. Kontaktdermatitis) hervorrufen. Sesamöl kann selten schwere allergische Reaktionen hervorrufen. Bei Überempfindlichkeit gegen einen oder mehrere der Inhaltsstoffe können allergische Reaktionen wie Hautreizungen, Juckreiz und Rötungen auftreten. In diesem Fall muss die Anwendung von Weiche Nasensalbe nach Dr. Bader® abgebrochen werden. Bei Fortbestehen der allergischen Symptome sollte ein Arzt/eine Ärztin aufgesucht werden. Bei Auftreten von Nebenwirkungen wenden Sie sich an Ihren Arzt/Ihre Ärztin oder Apotheker/in. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Gebrauchsinformation angegeben sind.

Jedes schwerwiegende Ereignis, das durch die Anwendung auftritt, soll dem Vertrieb, Hersteller und der zuständigen Behörde gemeldet werden: Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte, Abteilung Medizinprodukte, Kurt-Georg-Kiesinger-Allee 3, D-53175 Bonn. www.bfarm.de

Wenn Sie eine größere Menge von Weiche Nasensalbe nach Dr. Bader® angewendet haben, als Sie sollten

Falls mehr Produkt als empfohlen verwendet wird, kann das überschüssige Produkt mit einem sauberen Tuch entfernt werden. Es sind keine Sicherheitsbedenken zu erwarten.

Hinweise zur Aufbewahrung und zur Haltbarkeit von Weiche Nasensalbe nach Dr. Bader®

Weiche Nasensalbe nach Dr. Bader® sollte nicht über 25°C gelagert werden.

Um Schäden an der Tube zu vermeiden, wird empfohlen, sie im Umkarton aufzubewahren. Weiche Nasensalbe nach Dr. Bader® muss außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahrt werden.

In welchen Packungsgrößen ist Weiche Nasensalbe nach Dr. Bader® erhältlich?

Weiche Nasensalbe nach Dr. Bader® ist in der Packungsgröße von 20 g in Apotheken erhältlich.



Unter 25°C lagern!

Vertrieb:
Wetterau Apotheke,
Kaiserstraße 128,
61169 Friedberg,
Telefon: 06031 9944

Hersteller: HÄLSA Pharma GmbH,
Maria-Goeppert-Straße 5,
23562 Lübeck, Germany

Stand der Information: 08/2025



Symbolliste

	Medizinprodukt		Bitte Gebrauchsanweisung beachten
	Vertriebspartner		Chargennummer
	Hersteller		Ablaufdatum
	Lagertemperatur		Produktidentifizierungsnummer
	Entspricht den Anforderungen der Medizinprodukteverordnung		

BP02/2026