

Flamirins®

Isotonisch gepufferte Wundspüllösung

Indikation

Flamirins® wird zur Reinigung von Wunden und zur Ablösung von haftenden Verbänden verwendet. Gereinigte Wunden heilen besser. Flamirins® entfernt Fremdkörper und abgestorbenes Gewebe mechanisch aus der Wunde und reduziert dadurch das Infektionsrisiko.

Eigenschaften

Flamirins® ist eine Lösung mit folgenden Eigenschaften:

- gepuffert (saurer pH-Wert)
- isotonisch

Diese Eigenschaften gewährleisten die einfache, schnelle und gründliche Reinigung kleiner Wunden. Nach dem erstmaligen Öffnen kann Flamirins® bis zum angegebenen Verfallsdatum mehrmals wiederverwendet werden.



Gebrauchsanweisung - 250 ml

1. Die Düse durch gleichzeitiges Aufwärtsdrücken der Lasche unterhalb der Düse auf die Einstellung „SPRAY“ (Sprühen) oder „STREAM“ (Strahl) drehen.
2. Die Lösung in die Wunde sprühen.
3. Die Wunde sorgfältig trockentupfen.
4. Die Düse auf die Einstellung „STOP“ drehen.

Vorsichtsmaßnahmen

- Nur zur äußerlichen Anwendung.
- Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.
- Nicht anwenden bei Hautreizungen oder Allergie gegen einen der Bestandteile.
- Nicht als antiseptische Lösung verwenden.
- Nicht am Augenlid oder im Auge anwenden. Falls Flamirins® mit den Augen in Berührung kommt, mindestens 5 Minuten lang mit fließendem Wasser ausspülen.
- Bei Verschlechterung der Wundverhältnisse einen Arzt zu Rate ziehen.

Aufbewahrung

Bei Raumtemperatur (< 25 °C) an einem trockenen Ort in der Originalverpackung aufbewahren. Das Verfallsdatum (USE BY Jahr/Monat) bezieht sich auf den letzten Tag des angegebenen Monats im angegebenen Jahr. Flasche sofort nach Gebrauch ordnungsgemäß verschließen.

Zusammensetzung

Gereinigtes Wasser, Natriumchlorid, Trinatriumphosphat, Polysorbat, Zitronensäure, Propylenglykol, Methyl-4-hydroxybenzoat, Propyl-4-hydroxybenzoat.

Packungsgrößen

- 250 ml



Flamirins® ist ein Medizinprodukt.