

Bedienungsanleitung Penispumpe

Wann kommt eine Penispumpe zum Einsatz?

Seien Sie beruhigt, denn zunächst muss gesagt werden, dass sehr viele Männer Erektionsprobleme haben und darunter natürlich leiden. Also es ist kein Einzelschicksal. Das ist schon mal beruhigend. Oftmals liegt es an Verengung der Blutgefäße im zunehmenden Alter. Aber auch an Stoffwechselstörungen, Bluthochdruck, Diabetes, sowie psychischen Stress, Aufregung und Leistungsdruck sind häufige Gründe. Also es sind Männer jeden Alters betroffen. Und klappt es mal nicht, dann kommt natürlich zusätzlich noch mehr psychischer Stress dazu. Eine Penispumpe kann hier möglicherweise sehr schnell Abhilfe schaffen, denn durch die Erzeugung des Vakuums wird vom Körper automatisch Blut in den Penis gepumpt und somit erigiert dieser.

Bitte lesen Sie sich die Bedienungsanleitung aufmerksam durch. Eine Penispumpe ist sehr ganz einfach zu benutzen und die Erklärungen sind mit den Schaubildern noch verständlicher für Sie gemacht. Sollten Ihnen die Penispumpe nicht weiterhelfen, dann suchen Sie bitte Ihren Facharzt auf und fragen Sie nach seinem Rat. Er hilft Ihnen sehr gerne diskret und unkompliziert weiter.

Wir haben Ihnen auch ein paar zusätzliche Tipps zusammengestellt, wie es noch einfacher und besser geht.

DIE BESTANDTEILE DER VAKUUM-PUMPE:




Entfernen Sie etwaige Folien und Verpackungsmaterial von dem Produkt. Prüfen Sie, ob die Manschette unten am Zylinder stabil fixiert ist. Verbinden Sie das Schlauchende mit der Öffnung oberhalb des Druckreglers. Sobald alle Elemente und Steckverbindungen fest verbunden sind – wichtig für die Erzeugung des Vakuums – ist die Pumpe einsatzbereit.

SO EINFACH GEHT'S!

- Führen Sie den nicht erigierten Penis vollständig durch die Manschette in den Zylinder ein.
- Drücken Sie den Zylinder fest an sich, damit die Manschette direkt an Ihrem Körper aufliegt.
- Pumpen Sie mit dem Handgriff nun langsam die Luft aus dem Zylinder.
- Bei richtiger Anwendung entsteht mit der Zeit im Zylinder ein Vakuum.
- Das Vakuum stärkt den Blutfluss in Ihren Penis bis zur Erektion.

Sollte kein Vakuum entstehen, dann überprüfen Sie bitte ob die Steckverbindungen fest miteinander verbunden sind und ob die Manschette Ihren Penis luftdicht abschließt, sowie fest am Rumpf Ihres Körpers anliegt.

Sollten Schmerzen oder andere körperliche Beeinträchtigung während des Pumpens auftreten, unterbrechen Sie bitte die Anwendung und entlüften den Zylinder durch Drücken des Druckreglers.

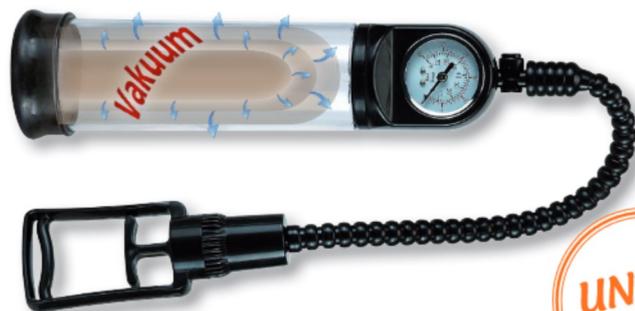

Tragen Sie vorher etwas LUBEXXX® Gleitmittel auf den Penis auf. Das erleichtert das Einführen in die Manschette. Ebenso ist die Anwendung im Stehen einfacher.

Um die Erektion nach Erzeugen des Vakuums mit der Pumpe noch länger zu halten, haben viele Männer gute Erfahrungen mit sogenannten Penisringen gemacht. Ein schmaler Silikonring, der außen über den Penis gezogen und bis zum Ansatz nach hinten geschoben wird. Dieser Silikonring staut das Blut, so dass das Blut länger im Penis bleibt und somit die Erektion anhält.

UNSER
TIPP



REINIGUNG & LAGERUNG

Bitte säubern Sie Ihre Penispumpe vor und nach jedem Gebrauch sorgfältig mit lauwarmen Wasser. Achten Sie darauf, dass Sie die Penispumpe nicht vollständig unter Wasser tauchen, weil sonst

Feuchtigkeit in den Druckanzeiger gelangen und dieser dadurch beschädigt werden kann. Bewahren Sie die Penispumpe sauber an einem trockenen Ort auf.