

GEBRAUCHSANWEISUNG

Diese Gebrauchsanweisung enthält wichtige Informationen zur Anwendung und Sicherheit des Produktes. Bitte lesen Sie die Informationen sorgfältig durch und bewahren Sie sie auf, um sie später noch einmal nachlesen zu können.

Produktbezeichnung

SYSTANE™ Gel Tropfen Benetzungsgel für die Augen

Beschreibung

SYSTANE™ Gel Tropfen Benetzungsgel für die Augen ist eine sterile Lösung die Polyethylenglykol 400, Propylenglykol, Hydroxypropyl-Guar, Sorbitol, Aminomethylpropanol, Borsäure, Kaliumchlorid, Natriumchlorid, Natriumedetat, das Konservierungsmittel POLYQUAD™ (Polidroniumchlorid) 0,001% und gereinigtes Wasser enthält. Zur Einstellung des pH-Wertes können Salzsäure und/oder Natriumhydroxid enthalten sein.

Klinischer Nutzen

SYSTANE™ Gel Tropfen Benetzungsgel für die Augen befeuchtet die Augenoberfläche, um sie vor Schäden zu schützen, die durch Symptome des trockenen Auges wie mangelnder Komfort und Irritationen entstehen können. SYSTANE™ Gel Tropfen Benetzungsgel für die Augen lindert die Symptome trockener Augen am Tag und in der Nacht und bieten Augenkomfort.

Verwendungszweck

SYSTANE™ Gel Tropfen Benetzungsgel für die Augen dienen zur Befeuchtung der Augenoberfläche.

Vorgesehene Anwender

Erwachsene (ab 18 Jahre) mit Symptomen trockener Augen, die in der Lage sind, die Gebrauchsanweisung zu verstehen und zu befolgen (oder eine Betreuungsperson haben, die dies für sie übernimmt).

Anwendungsgebiete

SYSTANE™ Gel Tropfen Benetzungsgel für die Augen werden angewendet zur vorübergehenden Linderung der Symptome trockener Augen wie mangelnder Komfort und Irritationen.



Leistungsmerkmale

Die gesammelten Nachweise aus präklinischen Daten, klinischen Studien, veröffentlichter klinischer Fachliteratur und Erfahrungen nach der Markteinführung zeigen, dass SYSTANE™ Gel Tropfen Benetzungsgel für die Augen seine Zweckbestimmung erfüllt. Es lindert vorübergehend die Symptome trockener Augen wie mangelnder Komfort und Irritationen.

Anwendungshinweise

- Waschen Sie Ihre Hände vor der Anwendung von Augentropfen
- **Vor Gebrauch gut schütteln.**
- SYSTANE™ Gel Tropfen Benetzungsgel für die Augen können nach Bedarf mehrmals am Tag und auch nachts angewendet werden, um die Symptome des trockenen Auges zu lindern. Sie können auch vor dem Aufsetzen und nach dem Absetzen von Kontaktlinsen angewendet werden.
- Öffnen Sie die Flasche, ohne die Tropferspitze zu berühren.
- Halten Sie die Flasche zwischen Daumen und Mittelfinger mit der Öffnung nach unten.
- Geben Sie 1 oder 2 Tropfen in das betroffene Auge oder in beide Augen und blinzeln Sie.

Siehe die Anleitung unten.

	Kopf leicht nach hinten neigen, Blick nach oben richten und mit dem Zeigefinger das Unterlid wegziehen.
	Durch leichten Druck auf den Flaschenboden der DROPTAINER™-Flasche Tropfen von oben in den Bindehautsack eintropfen, ohne dass die Flaschenspitze mit dem Auge oder Lidrand in Berührung kommt.

Gegenanzeigen (Gründe gegen eine Anwendung)






Wenn Sie allergisch gegen einen der Inhaltsstoffe von SYSTANE™ Gel Tropfen Benetzungsgel für die Augen sind, sollten Sie dieses Produkt nicht verwenden.

Warnhinweise

Es ist wichtig, dass Sie die Anweisungen Ihres Augenspezialisten oder Fachberaters und die Hinweise zur korrekten Anwendung des Produktes in der Gebrauchsanweisung beachten. Wenn es bei Ihnen zu anhaltenden Augenbeschwerden, übermäßigem Tränenfluss, Sehveränderungen oder Augenrötung kommt, beenden Sie die Anwendung von SYSTANE™ Gel Tropfen Benetzungsgel für die Augen und suchen Sie Ihren Augenspezialisten oder Fachberater auf, da sich diese Beschwerden verschlimmern könnten.

Vorübergehendes verschwommenes Sehen und andere Seheinschränkungen können Ihre Verkehrstüchtigkeit oder die Fähigkeit zum Bedienen von Maschinen beeinträchtigen. Wenn Sie nach dem Eintropfen verschwommen sehen, dürfen Sie erst wieder am Straßenverkehr teilnehmen oder Maschinen bedienen, wenn diese Beeinträchtigung abgeklungen ist.

Vorsichtsmaßnahmen

- Darf nur am Auge verwendet werden.
- ANBRUCHSCHUTZ: Nicht verwenden, wenn die Versiegelung der Verschlusskappe beschädigt ist oder fehlt.
- Nach dem ersten Öffnen der Verschlusskappe ist der Anbruchschutzring lose. Entfernen Sie diesen vor der ersten Anwendung am Auge.
- Nicht verwenden, wenn die Packung oder die Flasche (Sterilverpackung) beschädigt ist. 
- Vermeiden Sie Berührungen der Tropferspitze der Flasche mit Oberflächen, um Verunreinigungen zu verhindern.
- Suchen Sie bei Verschlucken des Produktes einen Arzt auf.
- Sie dürfen das Produkt nicht verwenden, wenn die Lösung verfärbt oder trüb ist.
- Nach Gebrauch Flasche wieder verschließen.
- Flasche bei Nichtgebrauch stets fest verschlossen halten.
- Borsäure kann möglicherweise reproduktionstoxisch sein. Dieses Produkt enthält Borsäure in einer Menge, die unbedenklich ist, wenn das Produkt gemäß Gebrauchsanweisung angewendet wird.
- Vor dem auf der Packung und Flasche angegebenen Verfalldatum verwenden. 
- Verwerfen Sie Restmengen der Lösung drei Monate nach Anbruch der Flasche. 
- Zwischen 15 °C und 30 °C lagern. 
- Für Kinder unzugänglich aufbewahren. 

Restrisiken und unerwünschte Nebenwirkungen

Mögliche Restrisiken und/oder unerwünschte Nebenwirkungen von SYSTANE™ Gel Tropfen Benetzungsgel für die Augen umfassen: Allergische Reaktion/Überempfindlichkeit, verschwommenes Sehen, vermindertes Sehvermögen (vorübergehend und dauerhaft), Reizungen, mikrobielle Infektionen, systemische Toxizität und Toxizitätsreaktion.

Wenn es zu anhaltenden Augenbeschwerden, übermäßigem Tränenfluss, Sehveränderungen oder Augenrötung kommt, beenden Sie die Anwendung von SYSTANE™ Geltropfen Benetzungsgel für die Augen und suchen Sie Ihren Augenspezialisten oder Fachberater auf, da sich die Beschwerden verschlimmern könnten.

Meldung schwerwiegender Vorkommnisse

Melden Sie alle schwerwiegenden Vorkommnisse im Zusammenhang mit der Anwendung dieses Produktes an Alcon Laboratories, Inc.:

Kontaktieren Sie die lokale Alcon Niederlassung oder Ihren Alcon Vertriebshändler.

E-Mail: qa.complaints@alcon.com









Melden Sie schwerwiegende Vorkommnisse auch an die für Medizinprodukte zuständige Behörde in Ihrem Land.

Packungsgrößen

SYSTANE™ Geltropfen Benetzungsgel für die Augen ist in Kunststoffflaschen mit 10 ml Füllvolumen erhältlich.

STERILE A Steril durch Anwendung aseptischer Verfahrenstechniken.

Erläuterung der Symbole

Symbol	Definition
	Achtung
	Gebrauchsanweisung oder elektronische Gebrauchsanweisung beachten
	Nicht verwenden, wenn die Packung beschädigt ist, und Gebrauchsanweisung beachten.
	Herstellungsdatum
	Enthält gefährliche Substanzen
	Einfaches Sterilbarriersystem
	Medizinprodukt
	Eindeutige Produktidentifizierung



Hersteller

Alcon Laboratories, Inc.
6201 South Freeway
Fort Worth, Texas 76134-2099, USA



Bevollmächtigter in der Europäischen Union

Alcon Laboratories Belgium
Lichterveld 3
2870 Puurs-Sint-Amands
Belgien



© 2024 Alcon Inc.



www.ifu.alcon.com

Stand: 2024-09

Alcon