

# Gebrauchsanweisung Rasierer zum Einmalgebrauch

Bitte lesen Sie die Gebrauchsanweisung vor der Anwendung sorgfältig durch und bewahren Sie diese gut auf. Prüfen Sie das Produkt vor jedem Gebrauch auf Schäden. Verwenden Sie keine defekten Produkte. Das Produkt ist kein Spielzeug. Bewahren Sie das Produkt an einem für Kinder unzugänglichen Ort auf.

## Gebrauchsanweisung:

Schutzkappe vor Gebrauch abziehen. Rasierer mit minimalem Druck über die Haut ziehen. Die Haut bei Bedarf straffen, damit nicht gegen Hautfalten rasiert wird. Mehrmals Haare vom Apparatkamm entfernen, damit eine optimale Funktion des Rasierers gewährleistet ist. Nach Gebrauch Schutzkappe wieder aufschieben, um Verletzungen bei der Entsorgung zu vermeiden. Der Apparat ist nach einmaliger Anwendung zu entsorgen. Trocken lagern bei -20 °C bis +50 °C.

## Hinweise:

- Für die trockene präoperative Rasur. Nicht im Gesicht anwenden!
- Bei unsachgemäßer Verwendung besteht Verletzungsgefahr.
- Die Dr. Junghans Medical GmbH übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch unsachgemäße Anwendung des Produktes entstehen.
- Der Artikel ist unsteril