

TEARS AGAIN® Sensitive

Augenspray

Mit Liposomen+ Dexpanthenol

Ohne Konservierungsmittel

Gebrauchsanweisung

Bitte lesen Sie diese Information sorgfältig durch, sie dient dazu das Produkt richtig anzuwenden.

Zusammensetzung:

Lecithin 10 mg/ml, Dexpanthenol, Natriumchlorid, Ethanol, Vitamin A - Palmitat, Aqua Purificata

Indikation und klinischer Nutzen:

TEARS AGAIN® Sensitive stabilisiert und schützt den Tränenfilm und verbessert die Befeuchtung der Augenoberfläche und der Augenlider.

Zur Behandlung und Linderung externer, umweltbedingter Reizungen des Auges durch Wiederherstellung des gestörten Tränenfilms. Anzuwenden bei trockenen, brennenden, juckenden, müden, gereizten, tränenden Augen oder Fremdkörpergefühl. Das Tragen von Kontaktlinsen wird durch die Anwendung angenehmer.

Leistungsmerkmale:

Liposomen (Lecithin) ergänzen die schützende Lipidschicht des Tränenfilms.

Liposomen und Dexpanthenol befeuchten die Augenpartie und pflegen und schützen zusätzlich die Haut.

Anwendung:

Sprühen Sie TEARS AGAIN® Sensitive 1-2 mal aus einem Abstand von 10 cm auf die geschlossenen Augenlider. Bei der Nutzung von Augen Make-up einen etwas größeren Abstand einhalten, um ein Verlaufen des Make-ups zu verhindern.

Im Allgemeinen empfiehlt sich eine 3-4 mal tägliche Anwendung. Bei stärkeren Beschwerden kann TEARS AGAIN® Sensitive bedenkenlos häufiger angewendet werden.

Eine Überdosierung ist aufgrund der Anwendungsart und der Zusammensetzung nicht möglich.

TEARS AGAIN® Sensitive kann während des Tragens von Kontaktlinsen verwendet werden.

Gegenanzeigen und Vorsichtsmaßnahmen:

Nicht anwenden bei einer Überempfindlichkeit gegenüber einem der Inhaltsstoffe.

Falls Sie zusätzlich Augentropfen/Augensalben verwenden, sollte ein zeitlicher Abstand von 10 Minuten eingehalten werden.

Nicht in das geöffnete Auge sprühen.

Für Kinder unzugänglich aufbewahren.

Falls die Beschwerden bestehen bleiben oder sich verschlechtern, suchen Sie medizinischen Rat.

Nebenwirkungen:

In sehr seltenen Fällen kann es zu vorübergehenden leichten Reizungen (z.B. Rötungen, Schwellungen der Augenlider) kommen, die auf den Anwendungsbereich begrenzt sind. Sie treten akut auf und klingen nach Beendigung der Anwendung rasch und folgenlos ab. Falls eine schwerwiegende, unerwünschte Reaktion in Zusammenhang mit diesem Medizinprodukt auftreten sollte, melden Sie dies bitte dem Hersteller oder der zuständigen Behörde.

Hinweise:

Für Erwachsene und Kinder.

Kinder sollten bei der Anwendung von einem Erwachsenen beaufsichtigt werden.

Aus technischen Gründen kann eine Restmenge in der Flasche verbleiben. Das angegebene Füllvolumen kann vollständig entnommen werden, da die Flasche überbefüllt ist. Bei Erstverwendung sind mehrere Pumpstöße notwendig.

TEARS AGAIN® Sensitive ist aufgrund der liposomalen Formulierung eine opaleszente Flüssigkeit mit milchigem Aussehen und dem charakteristischen, natürlichen Geruch nach Lecithin. Es kann im Laufe der Lagerung zum Auftreten von bräunlichen Trübungen/Ablagerungen, insbesondere innerhalb des Pumpenkörpers im Bereich der Feder, kommen. Dies ist ein Charakteristikum der enthaltenen pflanzlichen Bestandteile (Lecithin), das aber ohne Einfluss auf die Wirksamkeit oder Verträglichkeit ist.

Haltbarkeit, Aufbewahrung und Entsorgung:

Empfohlene Lagerbedingung:

Raumtemperatur, nicht einfrieren. Nach Anbruch 6 Monate verwendbar. Nach Ablauf des Verfalldatums nicht mehr verwenden. Entsorgung entsprechend lokaler Vorgaben.

Stand der Information: 2025-07



Optima Pharmazeutische GmbH
Am Söldnermoos 17
DE-85399 Hallbergmoos
tearsagain.de



Optima Sanità S.r.l.
Viale della Stazione 5
IT-39100 Bolzano (BZ)



Optima Medical Swiss AG
Bundesstr. 7
CH-6300 Zug



Hersteller



Nach Anbruch 6 Monate
verwendbar



Verfalldatum
(JJJJ-MM: Jahr-Monat)



Gebrauchsanweisung
beachten



Medizinprodukt



Chargen-Nummer



Nicht verwenden wenn
die Flasche beschädigt ist



Bevollmächtigter in der
Europäischen Gemeinschaft

TEARS AGAIN®

Tears Again® Hyaluron-Gel

Augentropfen
Natriumhyaluronat 3 mg/ml
Ohne Konservierungsmittel

Gebrauchsanweisung

Bitte lesen Sie diese Information sorgfältig durch, sie dient dazu das Produkt richtig anzuwenden.

Zusammensetzung

Natriumhyaluronat 3 mg/ml, Natriumchlorid, Kaliumchlorid, Dinatriumhydrogenphosphat Dodecahydrat, Natriumdihydrogenphosphat Dihydrat, Magnesiumchlorid Hexahydrat, Calciumchlorid Dihydrat, Natriumhydrogencarbonat, Aqua purificata

Indikation und klinischer Nutzen

Zur intensiven Befeuchtung der Augenoberfläche bei trockenen, müden, gereizten, überanstrengten oder brennenden Augen aufgrund des trockenen Augen Syndroms und Umweltfaktoren (z.B. Medikamente, Umweltverschmutzung, Computernutzung, Klimaanlage, Allergie, Benetzung von Kontaktlinsen während des Tragens) sowie nach operativen Eingriffen am Auge.

Tears Again® Hyaluron-Gel macht das Tragen von Kontaktlinsen angenehmer.

Leistungsmerkmale

Konservierungsmittelfreie wässrige Lösung auf Basis von Hyaluronsäure und Elektrolyten versorgt das Auge mit Feuchtigkeit.

Anwendung



1. Vor dem ersten Gebrauch Originalitätsverschluss entfernen (Abb. 1).
2. Vor jedem Gebrauch die Kappe abnehmen und nach der Anwendung wieder aufsetzen (Abb. 2). Vermeiden Sie jeden Kontakt mit der Tropfer Spitze.
3. Den Kopf etwas nach hinten neigen und die Flasche mit der Tropferöffnung senkrecht nach unten über das Auge halten (Abb. 3).
4. Das Auge vorsichtig mit Daumen und Zeigefinger öffnen oder das Unterlid leicht nach unten ziehen (Abb. 4).
5. Durch leichtes Drücken auf die Mitte der Flasche werden 1-2 Tropfen auf die Augenoberfläche oder in den Bindehautsack eingebracht (Abb. 4).

Im Allgemeinen empfiehlt sich eine 4-mal tägliche Anwendung. Bei stärkeren Beschwerden kann Tears Again® Hyaluron-Gel bedenkenlos häufiger angewendet werden.

Eine Überdosierung ist aufgrund der Anwendungsart und der Zusammensetzung nicht möglich. Tears Again® Hyaluron-Gel kann während des Tragens von harten oder weichen Kontaktlinsen verwendet werden.

Gegenanzeigen und Vorsichtsmaßnahmen

Nicht anwenden bei einer Überempfindlichkeit gegenüber einem der Inhaltsstoffe.

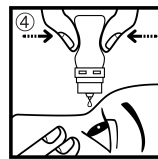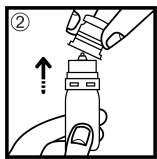

Falls Sie zusätzlich Augentropfen/Augensalben verwenden, sollte ein zeitlicher Abstand von 30 Minuten eingehalten werden.

Für Kinder unzugänglich aufbewahren.

Falls die Beschwerden bestehen bleiben oder sich verschlechtern, suchen Sie medizinischen Rat.

Nebenwirkungen

In sehr seltenen Fällen kann es zu Überempfindlichkeitsreaktionen kommen, die nach Beendigung der Anwendung rasch und folgenlos abklingen. Falls eine schwerwiegende, unerwünschte Reaktion in Zusammenhang mit diesem Medizinprodukt auftreten sollte, melden Sie dies bitte dem Hersteller oder der zuständigen Behörde.

Hinweise

Unmittelbar nach der Anwendung kann die Sehschärfe kurzfristig beeinträchtigt sein.

Für Erwachsene und Kinder. Kinder sollten bei der Anwendung von einem Erwachsenen beaufsichtigt werden.

In sehr seltenen Fällen wurde von Hornhautkalkifizierungen in Zusammenhang mit der Anwendung von Augentropfen mit erhöhter Phosphatkonzentration bei Patienten mit erheblich beschädigter Hornhaut berichtet. Tears Again® Hyaluron-Gel Augentropfen enthalten lediglich die physiologische Phosphatkonzentration, so dass Ihre Anwendbarkeit auch bei bestehenden stärkeren Hornhautstörungen/-schädigungen grundsätzlich nicht eingeschränkt ist. Sofern zusätzlich weitere Augentropfen-Präparate angewendet werden, sollte in diesem Zusammenhang aber auf deren Phosphatgehalt geachtet werden, da insbesondere bei Antiglaukomatosa oder Antiallergika erhöhte Phosphatkonzentrationen enthalten sein können.

Haltbarkeit, Aufbewahrung und Entsorgung

Empfohlene Lagerbedingung: Raumtemperatur, nicht einfrieren.

Nach Anbruch 6 Monate verwendbar.

Nach Ablauf des Verfalldatums nicht mehr verwenden.

Entsorgung entsprechend lokaler Vorgaben.

Stand der Information: 2025-03



Optima Pharmazeutische GmbH
Am Söldnermoos 17, DE-85399 Hallbergmoos
optimapharma.de



Optima Medical Swiss AG
Bundesstr. 7
CH-6300 Zug



Optima Sanità S.r.l.
Viale della Stazione 5
IT-39100 Bolzano (BZ)



Hersteller

STERILE A

Sterilisiert mit aseptischen Verfahren



Nach Anbruch 6 Monate verwendbar

Herstellungsdatum
(JJJJ-MM: Jahr-Monat)



Importeur

Verfalldatum
(JJJJ-MM: Jahr-Monat)



Gebrauchsanweisung beachten



Medizinprodukt

Chargen-Nummer



Nicht verwenden wenn die Flasche beschädigt ist



Bevollmächtigter in der Europäischen Gemeinschaft