

BiomoPedicul Nissenkamm mit Einmalhandschuhen

Zum Entfernen von Lauseiern und Nissen

Liebe Eltern,

lesen Sie die folgende Gebrauchsinformation für den BiomoPedicul Nissenkamm sorgfältig durch! Sie enthält wichtige Informationen für die Anwendung.

Was ist das Besondere am BiomoPedicul Nissenkamm?

Der Biomopedicul Nissenkamm ist aus pflegeleichtem Plastik und besteht aus einem gröberen und einem feineren Kammteil. Aufgrund seiner besonderen Beschaffenheit behandelt der BiomoPedicul Nissenkamm Haar und Kopfhaut schonend und ist leichter zu reinigen.

Wofür wird der BiomoPedicul Nissenkamm angewendet?

Der BiomoPedicul Nissenkamm besteht aus einem gröberen und einem feineren Kammteil. Mit dem gröberen Kammteil können Sie die Haare erst einmal durchkämmen, um Knötchen und Verwicklungen zu lösen.

Anschließend können Sie mit dem BiomoPedicul Nissenkamm Lausier und Nissen (leere Eihüllen) von Kopfläusen aus den Haaren entfernen. Das Auskämmen der Kopfhaare mit einem Nissenkamm kann eine Behandlung mit einem hochwirksamen Arzneimittel gegen Kopfläuse auf keinen Fall ersetzen. Bei einem akuten Kopflausbefall empfehlen wir Ihnen zuerst eine medikamentöse Behandlung mit der vom Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte zugelassenen BiomoPedicul 0,5 % Lösung durchzuführen. BiomoPedicul 0,5 % Lösung ist hochwirksam und beseitigt Kopfläuse schnell und effektiv. Anschließend sollten Sie das noch feuchte Kopfhair sorgfältig Strähne für Strähne mit dem Nissenkamm auskämmen.

Wie wird der BiomoPedicul Nissenkamm angewendet?

Der zweiseitige Nissenkamm eignet sich in idealer Weise zum durchkämmen von langen Haaren, die mit dem groben Teil vorgekämmt und anschließend mit dem feinen Kammteil von Nissen und Eiern befreit werden können. Nehmen Sie sich zum Auskämmen ausreichend Zeit. In Abhängigkeit von Länge und Dichte der Haare kann das Auskämmen bis zu 30 Minuten beanspruchen. Aus hygienischen Gründen empfiehlt sich die Benutzung der beigegefügt Einmalhandschuhe.

- Das Haar mit klarem Wasser anfeuchten und mit einem normalen Kamm durchkämmen, um eventuelle Knötchen zu lösen.

- Das feuchte Haar am Haaransatz ansetzend Strähne für Strähne bis zu den Haarspitzen mit dem Nissenkamm sorgfältig auskämmen und den Nissenkamm jeweils sorgfältig auf einem hellen Tuch auswischen bzw. unter fließendem Wasser reinigen bis Sie keine Kopfläuse und Eier mehr finden.
- Wenn Sie die Haare vollständig durchgekämmt haben und keine Kopfläuse und Eier mehr finden spülen Sie den Nissenkamm mit klarem, warmem Wasser aus.

Wie oft und wie lange können Sie den BiomoPedicul Nissenkamm benutzen?

In der Regel reicht aufgrund der zuverlässigen arzneilichen Wirksamkeit von BiomoPedicul 0,5 % Lösung ein einmaliges Auskämmen. Es ist jedoch zu empfehlen in den folgenden Tagen die Haare durchzukämmen um auch extrem hartnäckiger Eier und Nissen sicher zu entfernen.

Wie reinigen Sie den Nissenkamm richtig?

Im Verlauf des Auskämmens sollten Sie den BiomoPedicul Nissenkamm mehrfach reinigen, indem Sie ihn auf einem hellen Papiertuch abwischen oder unter fließendem Wasser abspülen.

Im Anschluss an das vollständige Durchkämmen können Sie den BiomoPedicul Nissenkamm mit einer Bürste unter fließendem Wasser sorgfältig reinigen.

Worauf sollten Sie noch achten?

Der geringe Abstand der Zinken, der notwendig ist um die Kopflauseier und Nissen auskämmen zu können, kann insbesondere bei dichtem, langen Haar Probleme bereiten. Es empfiehlt sich nur dünne Haarsträhnen durchzukämmen um ein vollständiges Auskämmen der Nissen zu gewährleisten.

biomo[®]pharma GmbH

Josef-Dietzgen-Straße 3
53773 Hennef
Tel.: 02242/8740-0
Fax: 02242/8740-499
E-Mail: biomo@biomopharma.de

Diese Packungsbeilage wurde zuletzt überarbeitet Mai 2015.
palde-b1055-150323-01

