

Beschreibung des Produkts

Nozohaem ist ein medizinisches Produkt zum einmaligen Gebrauch. Es handelt sich um ein transparentes Gel in einer Polyethylene-Tube mit langer Dosierspitze und Drehverschluss.

nozohaem[®] Nasen Gel

Was enthält Nozohaem?

Gereinigtes Wasser (74,6 %), Hydroxyethylcellulose (5 %), 4-Hydroxybenzoesäuremethylester E218, Citronensäure-Monohydrat, Kaliumsorbat E202, Calciumchlorid-Dihydrat.

Verwendungszweck

Das in Nozohaem enthaltene Gel dient dem Zweck, leichten Druck auf die Blutgefäße in der Nase auszuüben und dadurch der Blutung entgegenzuwirken.

Indikationen

Gelegentliches, leichtes bis moderates Nasenbluten bei Erwachsenen und Kindern ab zwei Jahren.

Gegenanzeigen

Schweres oder häufiges Nasenbluten. Allergien gegen einen der Inhaltsstoffe von Nozohaem.

Achtung

- Geöffnete Tuben sind unverzüglich zu verwenden und nicht für eine spätere Benutzung aufzubewahren.
- Zur Verhinderung von Kreuzkontamination und Infektionen darf dieselbe Tube nicht von verschiedenen Personen benutzt werden.
- Jeweils nur in einem Nasenloch anwenden.
- Nicht im Schlaf anwenden.

Schwangerschaft und Stillen

Keine Risiken bekannt. Wenden Sie sich an Ihren Arzt, wenn Sie unsicher sind.

Gebrauchsanleitung

Führen Sie die Spitze der Nozohaem Tube 1–1,5 cm tief in das betroffene Nasenloch ein. Drücken Sie jetzt das Gel aus der Tube in die Nase, bis die Blutung stoppt. Sie können mit Daumen und Zeigefinger der freien Hand die Nase am unteren Rand der Nasenflügel leicht zusammendrücken, damit beim Einbringen das Gel nicht nach unten entweicht.

In der Regel liegt die Nasenblutung im vorderen Bereich (anterior). Dann genügt eine Tube. Liegt die Nasenblutung weiter hinten (posterior) in der Nasenhöhle, können zwei oder in Ausnahmefällen auch drei Tuben erforderlich sein.

Wenden Sie das Gel so lange weiter an, bis die Blutung stoppt oder 3 Tuben geleert wurden. Das Gel sollte mindestens 30 Minuten lang in der Nase verbleiben. Zur Oberlippe hin auslaufendes Gel können Sie mit einem Papiertuch oder Watte abtupfen.

Das Gel wird nach und nach durch den natürlichen Reinigungsmechanismus der Nase abtransportiert.

Kann die Blutung nicht gestoppt werden bzw. hält sie länger als 30 Minuten an, sollten sie einen Arzt aufsuchen.

Was geschieht, wenn Sie eine zu große Dosis verwenden?

Im oben angegebenen Dosierungsrahmen wurden keine negativen Auswirkungen der Inhaltsstoffe des Medizinprodukts Nozohaem festgestellt.

Welche Nebenwirkungen kann Nozohaem hervorrufen?

Es wurden keine Nebenwirkungen berichtet.

Wenn Sie den Verdacht haben, die Anwendung von Nozohaem habe bei Ihnen ernste Nebenwirkungen verursacht, konsultieren Sie Ihren Arzt und berichten Sie dem Hersteller von dem Vorfall. Ernste unerwünschte Wirkungen sind außerdem der zuständigen Aufsichtsbehörde Ihres Mitgliedsstaates zu melden.

Wie ist Nozohaem zu lagern?

Bewahren Sie Nozohaem dunkel bei einer Temperatur von 5–25°C auf.

Das Produkt sollte vor dem Verwendbar-bis-Datum verwendet werden, das auf der Tube aufgebracht ist.

Entsorgung

Gebrauchte Tuben sind direkt nach der Verwendung im Abfall zu entsorgen.

Hersteller

Linköpings Tekniska Fabrik AB (LTF AB)
Barhällsgatan 14
SE-582 39 Linköping, SWEDEN
Telefon: +46 13-13 60 00
+46 70-311 40 61

Vertrieb

Hommel Pharma GmbH & Co. KG
Auf dem Quellberg 8
48249 Dülmen,
Deutschland
Telefon: +49 25 94 – 78 306 – 0

Herausgegeben in 05 / 2021

