

Gebrauchsanweisung

Bitte lesen Sie die Gebrauchsanweisung sorgfältig durch, denn sie enthält wichtige Informationen für Sie. Heben Sie diese Gebrauchsanweisung auf. Möglicherweise müssen Sie diese später nochmals lesen. Fragen Sie bitte Ihren Arzt oder Apotheker, wenn Sie weitere Informationen oder einen Rat benötigen. Wenn sich Ihre Symptome verschlimmern oder keine Besserung eintritt, müssen Sie auf jeden Fall einen Arzt aufsuchen.

EvoTears® OMEGA

**Zur Stabilisierung der Lipidschicht des Tränenfilms,
Benetzung und Schutz der Augenoberfläche und
Linderung der Symptome bei trockenen Augen.**

Sterile, phosphatfreie Augentropfen, ohne Konservierungsmittel, mit Perfluorohexyloctane und 0,2 % Omega-3-Fettsäuren

Was ist EvoTears® OMEGA und wofür wird es angewendet?

EvoTears® OMEGA ist ein Medizinprodukt aus einer wasserfreien Augentropfenflüssigkeit, die keine Konservierungsmittel und kein Phosphat enthält.

EvoTears® OMEGA enthält Perfluorohexyloctane (EyeSol®) mit 0,2 % Omega-3 Fettsäuren (gewonnen aus Algen).

EvoTears® OMEGA stabilisiert die Lipidschicht des Tränenfilms und verringert die Verdunstung der darunterliegenden wässrigen Schicht. EvoTears® OMEGA benetzt und schützt die Augenoberfläche und lindert hierdurch die Symptome bei trockenen Augen, wie Augenbrennen, Jucken, Stechen und Fremdkörpergefühl.

Was müssen Sie vor der Anwendung von EvoTears® OMEGA beachten?

EvoTears® OMEGA darf nicht angewendet werden, wenn Sie überempfindlich (allergisch) gegen die Inhaltsstoffe Perfluorohexyloctane oder Omega-3 Fettsäuren sind.

Besondere Vorsicht ist bei der Anwendung von EvoTears® OMEGA erforderlich, wenn Sie gleichzeitig noch andere Medikamente am Auge anwenden. Es sollte ein Anwendungsabstand von mindestens 15 Minuten eingehalten werden.

Wenn Sie Kontaktlinsen tragen, sollten Sie EvoTears® OMEGA nicht anwenden, da keine hinreichenden Daten zur Verträglichkeit mit den Kontaktlinsenmaterialien vorliegen.

Anwendung bei Schwangeren, stillenden Frauen und Kindern:




Es liegen noch keine Daten zur Sicherheit bei Kindern, Schwangeren oder Stillenden vor, daher wird die Anwendung von EvoTears® OMEGA hier nicht empfohlen.

Wie ist EvoTears® OMEGA anzuwenden?

Soweit nicht anders von Ihrem Arzt empfohlen, tropfen Sie bis zu 4-mal täglich 1 Tropfen in das untere Augenlid. Da EvoTears® OMEGA frei von Konservierungsmitteln ist, können Sie es täglich benutzen.

Hinweis: Aufgrund der speziellen Beschaffenheit von EvoTears® OMEGA ist es möglich, dass Sie den Tropfen im Auge nicht spüren. In diesem Fall empfehlen wir die Anwendung vor dem Spiegel.

1. Schrauben Sie die Verschlusskappe von der Flasche ab.	
--	--

2. Vor der erstmaligen Anwendung von EvoTears® OMEGA lösen Sie die Verschlusskappe vom Versiegelungsring und entfernen diesen.	
3. Vermeiden Sie nach Entfernung der Verschlusskappe jede Berührung der Tropferspitze mit der Haut, dem Auge und den Wimpern.	
4. Um einen Verlust von Tropfen zu vermeiden, lesen Sie bitte erst Punkt 5.-6. durch, bevor Sie die Schritte ausführen.	
5. Halten Sie die geöffnete Flasche mit der Tropferspitze nach oben und drücken diese mit Daumen und Zeigefinger leicht zusammen.	
6. Bevor Sie die Flasche zum Auge führen, drehen Sie die zusammengedrückte Flasche mit der Tropferspitze nach unten und lösen anschließend sofort den Druck. Hierbei strömt etwas Luft in die Flasche. Halten Sie weiterhin die Flasche mit der Tropferspitze nach unten.	
7. Neigen Sie den Kopf leicht nach hinten, ziehen Sie vorsichtig das untere Augenlid etwas vom Auge ab. Schauen Sie nach oben.	
8. Halten Sie die umgedrehte geöffnete Flasche senkrecht über das Auge. Durch einen leichten Druck auf die Flasche geben Sie nur einen Tropfen in jedes Auge.	
9. Zur gleichmäßigen Verteilung von EvoTears® OMEGA schließen Sie nach der Anwendung die Augen.	
10. Verschließen Sie die Flasche nach Gebrauch wieder mit der Verschlusskappe.	


EvoTears® OMEGA kann nach dem ersten Öffnen 8 Wochen verwendet werden. Bitte notieren Sie das Anbruchsdatum auf der Faltschachtel.


Wenn Sie weitere Fragen zur Anwendung des Medizinproduktes haben, fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker.

Welche Nebenwirkungen können bei der Anwendung von EvoTears® OMEGA auftreten?

Anzeichen einer vorübergehenden Augenreizung (wie Brennen, Jucken oder Rötung des Auges) und vorübergehend verschwommenes Sehen sind mögliche Nebenwirkungen nach der Anwendung von EvoTears® OMEGA. Wenn bei Ihnen eine länger anhaltende Reizung der Augen auftreten sollte, beenden Sie die Anwendung und suchen Sie Rat bei Ihrem Arzt oder Apotheker. Schwerwiegende Vorkommnisse melden Sie bitte dem Hersteller und der zuständigen Überwachungsbehörde.

Weitere Hinweise:


Verwenden Sie EvoTears® OMEGA nicht, wenn die Flasche oder der Originalitätsverschluss beschädigt ist ().

Nach Ablauf des aufgedruckten Verfallsdatums () darf EvoTears® OMEGA nicht mehr verwendet werden.

Flüssigkeit nicht einnehmen.

Wie ist EvoTears® OMEGA aufzubewahren?

Für Kinder unzugänglich aufbewahren.

Nicht über 25 °C lagern ().


Folgende Packungsgröße ist erhältlich:

Packung mit 3 ml Augentropfen. Unverkäufliches Muster mit 1 ml Augentropfen.

Zur besseren Handhabung werden die Augentropfen in Flaschen mit 5 ml Nennvolumen abgefüllt, die dadurch nur zu etwa der Hälfte gefüllt sind. Die Abfüllung erfolgt unter ständiger Kontrolle, so dass eine Minderfüllung der Flasche ausgeschlossen ist.

Stand der Information:

Januar 2023

Hersteller ():

Novaliq GmbH, Im Neuenheimer Feld 515, 69120 Heidelberg, Deutschland

Händler in Deutschland:

URSAPHARM Arzneimittel GmbH, Industriestraße, 66129 Saarbrücken

Tel.: +49 6805 9292-0, Fax: +49 6805 9292-88,

E-Mail: info@ursapharm.de, www.ursapharm.de

Händler in Österreich:

URSAPHARM Ges.m.b.H., 3400 Klosterneuburg

Tel.: +43 2243/26006, Fax: +43 125 330 339 113,

E-Mail: office@ursapharm.at, www.ursapharm.at

Händler in Belgien, Luxemburg, Niederlande:

URSAPHARM Benelux B.V., Postbus 172, 5700 AD Helmond, Niederlande

Tel.: +31 492 472 473, Fax: +31 492 472 673,

E-Mail: info@ursapharm.nl, info@ursapharm.be,

www.ursapharm.nl, www.ursapharm.be



0483 Medizinprodukt

