

Cerutalgin

SPRAY



MEDIZINPRODUKT

1. Was ist das Medizinprodukt Cerutalgin Spray und wofür wird es angewendet?

Cerutalgin Spray ist ein Produkt, das der Entfernung von Ohrenschmalz (Cerumen) im äußeren Gehörgang dient. Die regelmäßige Anwendung von **Cerutalgin Spray** trägt zur Aufrechterhaltung der Hygiene im Ohr bei und verhindert die Bildung von Ohrenpfropfen.

Cerutalgin Spray enthält:

- Natriumdocusat dient der Reinigung des Gehörganges;
- Ringelblume dient der Beruhigung.

Die Anwendung des Medizinprodukts **Cerutalgin Spray** kann die Bildung von Ohrenpfropfen verhindern, wodurch eine Verschlechterung der Hörqualität vermieden werden kann.

Cerutalgin Spray enthält keine Konservierungsstoffe.

2. Beachten Sie vor der Anwendung des Medizinprodukts folgendes:

Bitte wenden Sie das Medizinprodukt **Cerutalgin Spray** nicht an, wenn eine Trommelfellperforation, eine Ohrinfektion, ein Ausfluss aus dem Ohr oder eine Allergie gegen einen der Inhaltsstoffe vorliegt.

Das Medizinprodukt ist für Erwachsene und Kinder (ab einem Jahr) bestimmt. Zur Anwendung bei Kindern unter einem Jahr sollte ein Arzt zu Rate gezogen werden.

3. Wie Sie das Medizinprodukt Cerutalgin Spray anwenden:

Für eine regelmäßige Pflege der Ohren wenden Sie das Medizinprodukt 1- bis 2-mal pro Woche an. Um angesammeltes Ohrenschmalz zu entfernen, wenden Sie das Medizinprodukt an drei aufeinander folgenden Tagen an.

Halten Sie den Sprühaufsatz vor den Eingang des Gehörganges und sprühen Sie einen Sprühstoß ein. Bei Bedarf kann die Anwendung mehrmals am Tag wiederholt werden. Spülen Sie das Ohr nach ein paar Minuten aus.

4. Mögliche Nebenwirkungen

Bei Überempfindlichkeit können Hautausschlag, Juckreiz und Rötungen auftreten.

5. Lagerungshinweis

Wenden Sie das Medizinprodukt nach Ablauf des Verfalldatums nicht mehr an.



^{25°C} **Nicht bei Temperaturen über 25 °C lagern, für Kinder unzugänglich aufbewahren.**



Spreewälder Arzneimittel GmbH
Schulstr. 9
D-15913 Märkische Heide

Spreewälder
Arzneimittel