

Sicca-Gynaedron®

Regenerierende Vaginalcrème

Was ist Sicca-Gynaedron® regenerierende Vaginalcrème?

Sicca-Gynaedron® ist eine hormonfreie, regenerierende Vaginalcrème mit 0.8% Milchsäure und 2% Dexpanthenol.

Sicca-Gynaedron® ist in einer Packung mit einer 50 g Tube und einem Applikator erhältlich.

Wie wirkt Sicca-Gynaedron® regenerierende Vaginalcrème?

Hormonelle Veränderungen, Stress, Einnahme von Antibiotika oder Verhütungsmittel (wie z.B. die Pille) können vaginale Trockenheit verursachen und die Anzahl der Milchsäurebakterien in der Vagina (Scheide) reduzieren, was zu einem Anstieg des natürlichen pH-Wertes führt. Dies kann zu wiederkehrenden, bakteriellen Vaginosen (Mischinfektionen) oder Pilzinfektionen mit unangenehmem Geruch führen.

4 Effekte tragen zur Wirkung von Sicca-Gynaedron® regenerierende Vaginalcrème bei:

- Milchsäure senkt und stabilisiert den pH-Wert, bringt dadurch die Laktobazillen-Flora ins Gleichgewicht und bildet so ein Abwehrsystem gegen Bakterien und Pilze.
- Dexpanthenol unterstützt den Aufbau und die physiologische Funktion der Haut und Schleimhaut. Zudem behandelt Dexpanthenol durch seine wasserbindenden und somit befeuchtenden Eigenschaften die vaginale Trockenheit und wirkt juckreizstillend, wundheilungsfördernd und regenerierend.
- Die Hydrocrème hat einen hohen Wassergehalt. Dadurch wird der Haut im Bereich der Vagina und des äußeren Intimbereichs Feuchtigkeit zurückgegeben, und sie wird vor Austrocknung und schmerzhaften Rissen geschützt.
- Pflegende Lipide (Fette) halten die Haut und die vaginale Schleimhaut geschmeidig und elastisch.

Was sind die Anwendungsgebiete von Sicca-Gynaedron® regenerierende Vaginalcrème?

Prophylaktisch (vorbeugend):

Sicca-Gynaedron® regeneriert die Vaginalschleimhaut und die Vaginalflora, stabilisiert und senkt den vaginalen pH-Wert und beugt damit einer bakteriellen Vaginose (Mischinfektion) und Pilzinfektionen vor. Sicca-Gynaedron® behandelt die vaginale Trockenheit und lindert so Brennen, Juckreiz, Wundgefühl und Schmerzen. Durch die hydratisierenden (befeuchtenden) Eigenschaften gibt Sicca-Gynaedron® der Vaginalschleimhaut ihre Feuchtigkeit zurück und hält sie geschmeidig. Sicca-Gynaedron® kann z.B. nach oder während einer Antibiotikatherapie, nach dem Schwimmen, nach dem Geschlechtsverkehr, nach der Menstruation, bei trockenem oder juckendem Intimbereich und Anus oder zur Hautpflege eingesetzt werden.

Therapiebegleitend:

Sicca-Gynaedron® unterstützt die Behandlung von Scheidenpilz-Infektionen und bakteriellen Infektionen und kann alternierend zu anderen lokalen Therapien (wie z.B. intravaginale Estriol-Hormon-Therapien, Ekzem-Therapien) verwendet werden. Außerdem kann Sicca-Gynaedron® begleitend zu Vaginaltabletten, wie z.B. vagi-C® (Vitamin C), appliziert werden. Dabei sollte die regenerierende Vaginalcrème vor der Anwendung von vagi-C® äußerlich auf den Intimbereich aufgetragen werden, insbesondere beim Vorhandensein von Hautschädigungen und schmerzhaften Rissen.

Wie verwenden Sie Sicca-Gynaedron® regenerierende Vaginalcrème?

Verwendungszweck	Dosierung pro Anwendung	Dauer der Anwendung
Alternierend zur Hormontherapie	3-5 ml	2-3-mal pro Woche
Prophylaxe einer bakteriellen Vaginose und Erhaltung des natürlichen pH-Gleichgewichts	3-5 ml	Jeden 3. Tag
Symptomatische Behandlung einer vaginalen Trockenheit oder eines Laktobazillenmangels	3-5 ml	Täglich, während 7 Tagen
Aufrechterhaltung des pH-Wertes während oder nach einer Antibiotikatherapie	3-5 ml	Täglich, während 7 Tagen
Pflege der Vagina und des äußeren Intimbereichs	3-5 ml	Nach Bedarf


Sicca-Gynaedron® ist für eine Langzeitanwendung geeignet und kann täglich aufgetragen werden, bis die Symptome verschwunden sind. Die Vaginalcrème ist frei von Hormonen, Duft- und Farbstoffen.

Wie wenden Sie Sicca-Gynaedron® regenerierende Vaginalcrème an?

Sicca-Gynaedron® wird am besten abends in liegender Position direkt in die Vagina (Scheide) appliziert.

Mit dem beigelegten und mehrfach verwendbaren Applikator können individuell zwischen 3 bis 5 ml Vaginalcrème appliziert werden.

1. Vor dem ersten Gebrauch den Tubenverschluss abschrauben und umgekehrt auf die Tubenöffnung drücken um den Membranverschluss zu durchstechen.
2. Applikator entriegeln:
 - 2a) Stößel bis zur Marke «2 ml» ziehen.
 - 2b) Stößel leicht zurück schieben bis kurz vor den ersten Anschlag.
3. Den entriegelten Applikator (siehe 2.) mit der Öffnung bis zum unteren Ende des Gewindes auf die Tube aufschrauben.

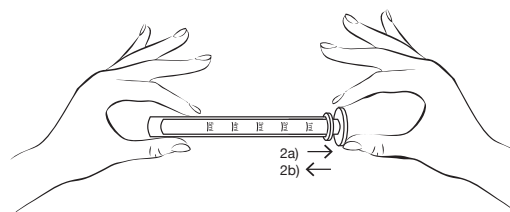


4. Die regenerierende Vaginalcrème mit leichtem Druck aus der Tube in den Applikator drücken bis zur gewünschten Dosierung. Dabei allenfalls den Stößel mit der anderen Hand leicht zurückziehen.

5. Applikator von der Tube abschrauben und Tube fest verschließen.

6. In Rückenlage den gefüllten Applikator möglichst tief in die Scheide einführen und die regenerierende Vaginalcrème mit dem Stößel herausdrücken.

7. Nach Gebrauch die Einzelteile des Applikators sorgfältig mit lauwarmem Wasser reinigen. Kochendes Wasser ist zu vermeiden, damit sich der Applikator nicht verformt.

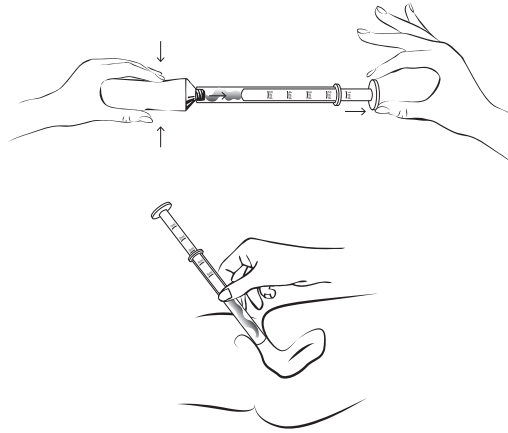

Wann dürfen Sie Sicca-Gynaedron® regenerierende Vaginalcrème nicht anwenden?

Bei Überempfindlichkeit gegen einen oder mehrere Inhaltsstoffe. Interaktionen mit anderen Medizinprodukten oder Medikamenten sind keine bekannt.

Wann ist bei der Anwendung von Sicca-Gynaedron® regenerierende Vaginalcrème besondere Vorsicht geboten?

Eine Beeinträchtigung der Sicherheit von Kondomen (Reißfestigkeit) kann nicht ausgeschlossen werden. Sicca-Gynaedron sollte nicht angewendet werden, wenn Sie sich in einer Kinderwunschbehandlung befinden, weil dies den Erfolg der Behandlung beeinträchtigen könnte.

Darf Sicca-Gynaedron® regenerierende Vaginalcrème während einer Schwangerschaft oder Stillzeit angewendet werden?

Einzelne Inhaltsstoffe von Sicca-Gynaedron können eine negative Auswirkung auf die Beweglichkeit und Überlebensfähigkeit von Spermien haben. Das Produkt sollte nicht angewendet werden, wenn Sie beabsichtigen, schwanger zu werden.

Aufgrund der Zusammensetzung und Wirkungsweise von Sicca-Gynaedron® - die regenerierende Vaginalcrème wird vom Körper nicht aufgenommen – besteht kein Risiko für das Kind. Eine Anwendung während der Schwangerschaft sollte mit einem Arzt besprochen werden, da keine wissenschaftlichen Untersuchungen dazu durchgeführt wurden.

Welche Nebenwirkungen kann Sicca-Gynaedron® regenerierende Vaginalcrème haben?

Bei einer vorbestehenden Schädigung der Vaginalschleimhaut können besonders zu Beginn der Anwendung Hautirritationen wie Juckreiz oder leichtes Brennen auftreten. Mit zunehmender Regeneration der Vaginalschleimhaut werden diese Symptome nachlassen. Falls sie anhalten und sich nicht bessern, sollte die Anwendung von Sicca-Gynaedron® ausgesetzt und ein Arzt aufgesucht werden.

Lagerung und Haltbarkeit

Sicca-Gynaedron® sollte zwischen 5 und 25°C und für Kinder unerschwinglich aufbewahrt werden. Nach der Anwendung ist die Tube sorgfältig zu verschließen, um ein Eintrocknen zu verhindern. Das Schraubgewinde ist sauber zu halten. Nach Anbruch ist die Tube über einen Zeitraum von 12 Monaten haltbar.

Packungen

Sicca-Gynaedron® Tube: Packung mit 50 g regenerierender Vaginalcrème inkl. Applikator.

Hersteller

Hälsa Pharma GmbH, Maria-Goeppert-Straße 5, D-23562 Lübeck

Entwicklung, Produktion

Drossapharm AG, Basel, Schweiz

Vertrieb

Drossapharm GmbH, D-79539 Lörrach

Zusammensetzung

Aqua, Isopropyl myristate, Cetearyl alcohol, Glyceryl stearate, PEG-20 Glyceryl stearate, Dexpanthenol (20 mg/g), Propylene glycol, Lactic acid (8 mg/g), Carbomer, Benzoic acid, Sodium hydroxide

Medizinprodukt

Stand der Information

November 2018

Erklärung der internationalen Symbole

	Hersteller
	Gebrauchsanweisung beachten
	Temperaturbegrenzung
	Verwendbar bis
	Chargenbezeichnung

Sicca-Gynaedron® Crème
Hälsa Pharma GmbH
Maria-Goeppert-Strasse 5
D-23562 Lübeck

0482

Applikator
Hubert De Backer n.v.
Laagstraat 59
B-9140 Temse

1639

