



### Sterile, isotonische Ringerlösung zur milden und verträglichen Reinigung der Nase

#### Liebe Verwenderin, lieber Verwender!

Die Siozwo® Nasenspülung ist eine sterile und isotonische Ringerlösung und gehört zu einem hochwertigen, aufeinander abgestimmten Produktprogramm zur Sanierung und Pflege Ihrer Nase. Bitte lesen Sie die nachfolgende Information aufmerksam, weil sie wichtige Angaben darüber enthält, was Sie bei der Anwendung dieses Medizinproduktes beachten sollten.

#### Was ist in Siozwo® Nasenspülung enthalten?

Die Siozwo® Nasenspülung enthält eine sterile, isotonische Ringerlösung – eine Salzlösung, die zusätzlich wichtige Mineralstoffe wie Kalium und Calcium enthält. Die Siozwo® Nasenspülung ist frei von Konservierungsstoffen und Gewöhnungseffekten.

Inhalt: Sterile isotonische Ringerlösung (Salzlösung) | Medizinprodukt

Bestandteile:

Natriumchlorid	0,86 g
Kaliumchlorid	0,03 g
Calciumchlorid	0,033 g
gereinigtes Wasser ad	100 ml

Zwischen 15°C und 30°C lagern.

#### Wann wird Siozwo® Nasenspülung angewendet?

**Siozwo® Nasenspülung erzeugt einen Sprühnebel und wird angewendet:**

Zur Reinigung und sanften Spülung der Nasenhöhle, z. B. zum Lösen von Krusten und Schleim, bei vermehrter Luftbelastung (z. B. Staub- und Schmutzbelastung) sowie als begleitende Maßnahme bei Schnupfen, allergischem Schnupfen und Heuschnupfen. Erkältungsviren, Allergene sowie Krankheitserreger werden aus der Nase gespült. Die Siozwo® Nasenspülung unterstützt die Befreiung der Nasenhöhle und erleichtert so die natürliche Atmung. Sie eignet sich auch zum Anfeuchten der Nasenschleimhaut bei geringer Luftfeuchtigkeit, z. B. in geheizten oder klimatisierten Räumen. Bei vermehrter Pollen- und Hausstaubbelastung können Überempfindlichkeitsreaktionen reduziert werden. Auch die Anwendung von abschwellenden Medikamenten kann verringert werden. Da die Siozwo® Nasenspülung eine sterile Lösung enthält, ist diese auch zur Anwendung vor und nach Nasenoperationen geeignet. Siozwo® Nasenspülung ist geeignet für Kinder ab 2 Jahren und Erwachsene. Die Siozwo® Nasenspülung verfügt über ein besonderes Sprühsystem, das Bag-on-Valve System, das eine leichte und angenehme Handhabung garantiert.

#### Wann darf Siozwo® Nasenspülung nicht angewendet werden?

Es gibt keine Anwendungsbeschränkungen.

#### Darf Siozwo® Nasenspülung während einer Schwangerschaft oder in der Stillzeit angewendet werden?

Es bestehen keine Bedenken gegen die Anwendung während der Schwangerschaft und Stillzeit.

#### Wie verwenden Sie Siozwo® Nasenspülung?

##### Dosierung:

Je nach Bedarf mehrmals täglich 1-2 Sprühstöße in jedes Nasenloch einsprühen. Bei Kindern sollte die Anwendung durch einen Erwachsenen erfolgen.

##### Anwendung:

Die Anwendung der Siozwo® Nasenspülung ist aufgrund ihres speziellen Sprühsystems in jeder Lage sowie Position möglich. Den Kopf über das Waschbecken halten und leicht nach vorne neigen, sowie seitlich drehen. Sprühöffnung in das obere Nasenloch einführen und Sprühkopf betätigen. Anschließend den Kopf auf die andere Seite drehen und Sprühvorgang am anderen Nasenloch durchführen. Danach Nase schnäuzen oder abwischen. Vorgang bei Bedarf wiederholen. Bitte halten Sie sich an die in der Gebrauchsinformation angegebene oder vom Arzt oder Apotheker empfohlene Dosierung.

#### Wie lange dürfen Sie Siozwo® Nasenspülung anwenden?

Bei Bedarf kann Siozwo® Nasenspülung ohne Bedenken auch über einen längeren Zeitraum angewendet werden. Die Dauer der Anwendung ist nicht begrenzt. Die Siozwo® Nasenspülung ist frei von Gewöhnungseffekten und Konservierungsstoffen.

#### Was ist ferner zu beachten?

##### Vorsichtsmaßnahmen:

Zur Vermeidung von Infektionen sollte die Nasenspülung nur von einer Person verwendet werden. Reinigen Sie nach jedem Gebrauch den Sprühkopf mit Seifenwasser und anschließend mit warmem Wasser.

##### Achtung:

Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten. Nicht durchstechen oder verbrennen, auch nicht nach Gebrauch. Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen sowie anderen Zündquellenarten fernhalten. Nicht rauchen. Vor Sonnenbestrahlung schützen. Nicht Temperaturen über 50°C/122°F aussetzen. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.

#### Welche Packungen sind erhältlich?

Siozwo® Nasenspülung ist in einer Packung mit 100 ml Lösung im Dauersprühsystem zum Einsprühen in die Nase erhältlich.

---

Siozwo® Nasenspülung ist exklusiv in Apotheken erhältlich.

Wenn Sie mehr über die Siozwo® Nasenspülung und über weitere Siozwo® Produkte wissen möchten, kontaktieren Sie uns gerne oder besuchen Sie unsere Internetseiten unter:



[www.siozwo.de](http://www.siozwo.de)

Fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker nach weiteren Produkten aus dem Siozwo®-Programm.

---

## ***Gezielt behandeln – wirksam vorbeugen mit Siozwo®***

### **Eine intakte Schleimhaut wird seltener krank**

Wer regelmäßig auf eine gesunde Schleimhaut achtet, ist widerstandsfähiger gegen Erkältungsschnupfen oder allergischen Schnupfen. Häufig genügt schon der Aufenthalt in trockener Heizungsluft, in klimatisierten Räumen oder auch ein Langstreckenflug, um die Schleimhaut zu schädigen. Sie sollten deshalb immer auf Pflege und Schutz Ihrer Nase achten. Siozwo® bietet Ihnen ein umfangreiches Programm von milden und verträglichen Produkten zur Pflege und Behandlung von Schnupfen, allergischem Schnupfen und Heuschnupfen an.

### **Siozwo® SAN Nasenspray** – mit Dexpanthenol und Meersalz

Bei trockener Nase, befeuchtet und pflegt, sowie als begleitende Maßnahme bei Reizungen der Nasenschleimhaut z.B. infolge von Heuschnupfen oder Erkältungen.

**Siozwo® PFLEGE** – Balsam mit pflegenden Wirkstoffen für die empfindliche Haut im Bereich der Nasenlöcher. Erholung und Regeneration der trockenen und gereizten Nase.

### ***Mit Siozwo® immer eine Nasenlänge voraus!***