



Faltschachtel
zusammengelegt bitte
zum Altpapier



Meersalz Nasen Spray

CETU1822
7109300-V5

NO INK
NO VARNISH

NEU: Packung mit weniger Plastik



Abtei Meersalz Nasen Spray
Medizinprodukt

Dosierungsanleitung:
Ohne Einschränkung - kann
täglich und so oft wie nötig
verwendet werden. Die Beauf-
sichtigung durch Erwachsene
wird für die Anwendung bei
Kindern empfohlen.



Anwendung:

- Entfernen Sie die Schutzkappe.
- Vor dem ersten Gebrauch einige Male pumpen, bis ein gleichmäßiger Sprühnebel austritt. Für alle weiteren Anwendungen ist das Spray sofort gebrauchsfertig.
- Halten Sie das Spray aufrecht und führen Sie die Sprühdüse vorsichtig in ein Nasenloch ein. Bei Säuglingen, Oberkörper aufrichten.
- Bei aufrechter Haltung in jedes Nasenloch sprühen.
- Lassen Sie das Produkt für einige Sekunden einwirken.
- Wiederholen Sie den Vorgang mit dem anderen Nasenloch.
- Erwachsene und Kinder ab 2 Jahren: bitte Nase putzen.



Meersalz Nasen Spray

REINES MEERWASSER



Befeuchtet + reinigt sanft

- ✓ Hilft, Pollen und Allergene auszuspülen
- ✓ Dauerhafte Anwendung möglich
- ✓ Ohne Konservierungsstoffe

Auch für Säuglinge*



Zusammensetzung:
100 % isotonische Meerwasser-
Lösung (entsprechen 9 g/l NaCl)

Außerhalb der Sicht- und
Reichweite von Kindern halten.

Nach Anbruch nicht länger als
6 Monate verwenden.
Bei anhaltenden nasalen
Beschwerden von mehr als
5 Tagen bei Säuglingen und
7-10 Tagen bei Kindern und
Erwachsenen, konsultieren Sie
bitte Ihren Arzt oder Apotheker.
Die Verwendung durch mehr als
eine Person kann Infektionen
verbreiten. Nicht anwenden nach
Ablauf des Verfallsdatums. Nicht
verwenden, wenn die Verpackung
beschädigt ist. Waschen Sie die
Sprühdüse nach jedem Gebrauch
mit heißem Wasser und trocknen
Sie sie gut ab.

Mögliche Beeinträchtigungen:
Bei nasalen Reizungen kann
während der Anwendung ein
vorübergehendes Kribbeln
auftreten.

STERILE A



Abtei Meersalz Nasen Spray
Befeuchtet & reinigt die Nase sanft:

- ▶ 100 % natürlich
- ▶ reines, isotonisiertes Meerwasser
- ▶ Zur **schonenden** Reinigung der Nasenhöhle (z. B. bei Luftbelastung durch Pollen und Staub)
- ▶ Befeuchtung der Nasenschleimhaut (bei geringer Luftfeuchtigkeit, z. B. in klimatisierten Räumen)

*Für Säuglinge ab 15 Tagen, Kinder und Erwachsene

- ▶ Steril
- ▶ Ohne Konservierungsstoffe
- ▶ Ohne Treibgas

Laboratoire de la Mer
ZAC de la Madeleine
Av. du Général Patton
35400 Saint-Malo, France



CE 0459

Vertrieb: Abtei OP Pharma GmbH,
Abtei 1, D-37696 Marienmünster

Inhalt: 20 ml

20 ml

www.abtei.de

LOT



No ink
No varnish

ZFN: 16993833

No ink
No varnish



Réserve de vernis / Zone Freller

5930A