




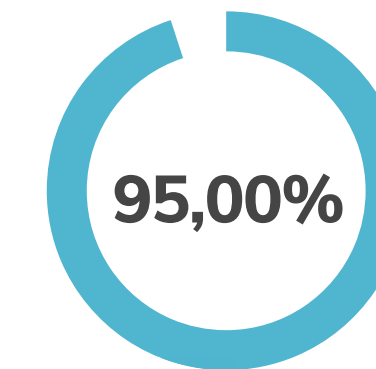

Sensitivität

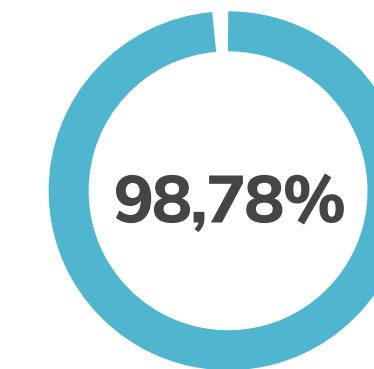

Spezifität

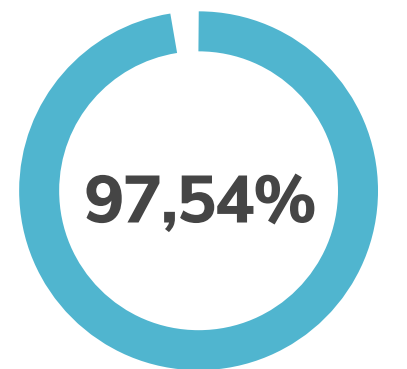

Genauigkeit

Der **EASY CHECK** von Ritter auf einen Blick:

- Zum Nachweis von SARS-CoV-2 in Speichel
- Patientenfreundlich durch nicht-invasive Proben-Entnahme
- Ideal für Kinder, ältere Menschen und Menschen mit Behinderungen
- Schnelle Testergebnisse bereits ab 4 Minuten (je nach Raumtemperatur)
- BfArM-gelistet und der Produzent hat eine „Prequalification“ bei der WHO



Bundesinstitut
für Arzneimittel
und Medizinprodukte



World Health
Organization



Auszug aus der **EASY CHECK** Gebrauchsanweisung:

Der EASY CHECK COVID-19 Antigen-Schnelltest kann mit hinteren oropharyngealen Speichelproben durchgeführt werden.

Für hintere oropharyngeale Speichelproben: waschen Sie Ihre Hände mit Seife und wasser- oder alkoholbasierten Lösungen. Öffnen Sie den Behälter.

1. Räuspern Sie sich, lösen Sie den Speichel aus dem Rachen und spucken Sie ihn in den Behälter (ungefähr 2ml). Vermeiden Sie eine Kontamination an der äußeren Oberfläche des Behälters durch den Speichel. Die beste Zeit um die Probe zu sammeln ist nach dem Aufstehen, bevor der Patient die Zähne geputzt, gegessen oder getrunken hat.
2. Nehmen Sie die Speichelprobe mit der Pipette auf.
3. Öffnen Sie das Probenröhrchen, geben die Probe hinein und schütteln Sie es um alles gut zu vermischen.
4. Nehmen Sie die Testkassette aus dem Beutel, legen Sie sie auf einen Tisch und schneiden Sie den vorstehenden Teil vom Deckel des Probenröhrchens ab. Geben Sie dann 3 Tropfen der Probe in die Probenvertiefung und lesen Sie das Resultat, je nach Raumtemperatur, nach 4-15 Minuten ab. Schnellste Ergebnisse bei Raumtemperatur zwischen 18-30°C.

(Testdurchführung nur durch medizinisches Fachpersonal)

