

3.22mm

1.85mm



VERSTOPFTE NASE

2 in 1 Nasenspray
& Spülung

100%
Natürliches,
angereichertes
Meerwasser

- Befreit die Nase
- Unterstützende Behandlung bei Erkältung

STÉRIMAR™ Verstopfte Nase ist eine hypertone Lösung aus Meerwasser mit höherer Salzkonzentration als die der Zellen des menschlichen Körpers und befreit die Nase („Osmosewirkung“). Die natürliche und konservierungsmittelfreie **STÉRIMAR™** Meerwasserlösung nutzt die anerkannten Eigenschaften von Mineralsalzen sowie Spurenelementen aus dem Meer und ist mit Kupfer und Mangan angereichert. Empfohlen für Kinder ab 3 Jahren und für Erwachsene bei Erkältungen oder Schnupfen zur:

- **Abschwellung der Nasenschleimhaut**
- **Unterstützung der Behandlung von Erkältungen** durch Ausspülen der Nasenhöhlen

ANWENDUNGSEMPFEHLUNG: Vor der ersten Anwendung einmal in die Luft sprühen, dann ist das Spray gebrauchsfertig.

Als Spray:

Kopf gerade halten und den Sprühkopf in das Nasenloch einführen. Einen oder zwei Sprühstöße in jedes Nasenloch geben. Überschüssige Lösung aus der Nase laufen lassen und dann die Nase putzen.

Als Spülung:

Den Kopf zur Seite neigen, den Sprühkopf in das obere Nasenloch einführen und für 2 bis 3 Sekunden gedrückt halten. Überschüssige Lösung aus dem anderen Nasenloch laufen lassen und dann die Nase putzen. Nach jedem Gebrauch den Sprühkopf mit heißem Wasser reinigen.

Zur Vermeidung der Übertragung von Krankheitserregern sollte jede Flasche immer nur von einem Anwender angewendet werden.

DOSIERUNG: 2- bis 6-mal täglich anwenden, bis die Nasenschleimhaut abgeschwollen ist. Zur vorübergehenden Anwendung bei einer verstopften Nase bestimmt.

ZUSAMMENSETZUNG: • Meerwasser • Kupfersalz-Pentahydrat • Mangansalz-Monohydrat • Gereinigtes Wasser, • Aseptisch verpackt. • Inertes Treibgas: Stickstoff. • Die Lösung kommt nicht mit Stickstoff in Kontakt.



LABORATOIRES
FUMOUCZE

www.sterimar.de



SOFIBEL Laboratoires Fumouze
110-114, rue Victor Hugo
92686 Levallois-Perret Cedex - France

Vertrieb
Church & Dwight UK Ltd.,
Folkestone, Kent, CT19 6PG

Warnhinweis

Wenn die Nasenschleimhaut gereizt ist, kann es bei der Anwendung in der Nase kribbeln.

Druckbehälter kann bei Erwärmung bersten. Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenem Feuer und anderer Zündquellen fernhalten. Beim Gebrauch nicht rauchen. Nicht durchstechen oder verbrennen, auch nicht nach Gebrauch. Vor Sonnenlicht schützen. Keinen Temperaturen über 50 °C aussetzen. Für Kinder unzugänglich aufbewahren.

0800 1652-100 Kunden Service Nummer

Nettovolumen: 50mL e 89 3

MD 0459

10877111



1087711-1 R03-2022

3.22mm

4.59r

1.5mm
1.5mm1.5mm
(clear)



VERSTOPFTE NASE

2 in 1 Nasenspray
& Spülung



- Befreit die Nase
- Unterstützende Behandlung bei Erkältung

STÉRIMAR™ Verstopfte Nase ist eine hypertone Lösung aus **Meerwasser** mit höherer Salzkonzentration als die der Zellen des menschlichen Körpers und **befreit die Nase** („Osmosewirkung“). Die natürliche und konservierungsmittelfreie **STÉRIMAR™** Meerwasserlösung nutzt die anerkannten Eigenschaften von Mineralsalzen sowie Spurenelementen aus dem Meer und ist mit **Kupfer und Mangan** angereichert. Empfohlen für **Kinder ab 3 Jahren** und für Erwachsene bei Erkältungen oder Schnupfen zur:

- **Abschwellung der Nasenschleimhaut**
- **Unterstützung der Behandlung von Erkältungen** durch Ausspülen der Nasenhöhlen

ANWENDUNGSEMPFEHLUNG: Vor der ersten Anwendung einmal in die Luft sprühen, dann ist das Spray gebrauchsfertig.

Als Spray:

Kopf gerade halten und den Sprühkopf in das Nasenloch einführen. Einen oder zwei Sprühdöße in jedes Nasenloch geben. Überschüssige Lösung aus der Nase laufen lassen und dann die Nase putzen.

Als Spülung:

Den Kopf zur Seite neigen, den Sprühkopf in das obere Nasenloch einführen und für 2 bis 3 Sekunden gedrückt halten. Überschüssige Lösung aus dem anderen Nasenloch laufen lassen und dann die Nase putzen. Nach jedem Gebrauch den Sprühkopf mit heißem Wasser reinigen.

Zur Vermeidung der Übertragung von Krankheitserregern sollte jede Flasche immer nur von einem Anwender angewendet werden.

DOSIERUNG: 2- bis 6-mal täglich anwenden, bis die Nasenschleimhaut abgeschwollen ist. Zur vorübergehenden Anwendung bei einer verstopften Nase bestimmt.

ZUSAMMENSETZUNG: • Meerwasser • Kupfersalz-Pentahydrat • Mangansalz-Monohydrat
• Gereinigtes Wasser. • Aseptisch verpackt. • Inertes Treibgas: Stickstoff. • Die Lösung kommt nicht mit Stickstoff in Kontakt.



Warnhinweis

Wenn die Nasenschleimhaut gereizt ist, kann es bei der Anwendung in der Nase kribbeln. Druckbehälter kann bei Erwärmung bersten. Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenem Feuer und anderen Zündquellen fernhalten. Beim Gebrauch nicht rauchen. Nicht durchstechen oder verbrennen, auch nicht nach Gebrauch. Vor Sonnenlicht schützen. Keinen Temperaturen über 50 °C aussetzen. Für Kinder unzugänglich aufbewahren.



www.sterimar.de

SOFIBEL Laboratoires Fumouze
110-114, rue Victor Hugo
92686 Levallois-Perret Cedex – France

Vertrieb: Church & Dwight UK Ltd.,
Folkestone, Kent, CT19 6PG

0800 1652-100 Kunden Service Nummer

Nettovolumen:

MD
0459
175

CE
0459

10877012



1087701-RRS-2022