

eye.care // aqua comfort

Für sensible Augen geeignet
Suitable for sensitive eyes

eye.CARE
C O M P A N Y


eye.care // aqua comfort

Kombilösung mit Natrium-
hyaluronat zur Pflege aller
Arten von Kontaktlinsen

All in one solution with hyaluronic
acid for any kind of contact lenses

AQUA-COMFORT
Mit Hyaluronat für
langen Tragekomfort 

Für sensible Augen geeignet
Suitable for sensitive eyes

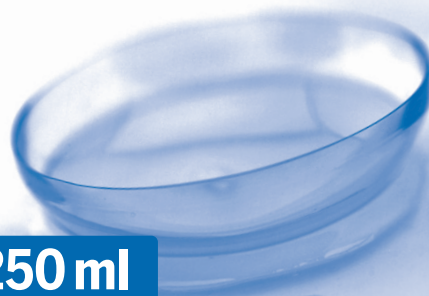

250 ml

eye.CARE
C O M P A N Y

EN

INDICATIONS

All in one contact lens solution to disinfect, store, clean, hydrate, moisturize, rinse and remove protein deposits for any kind of contact lenses, silicone hydrogel lenses included. Suitable for sensitive and dry eyes | Lens case included.

INSTRUCTIONS FOR USE

Wash and dry carefully your hands | Remove the lens, put some drops of *eye.care // aqua comfort* solution and rub the lens surface | Rinse the lenses with the solution to remove any deposits | Place the lenses in the lens case and fill it with solution | Let soak contact lenses at least 4 hours or better still overnight | Lightly shake the case before removing the lenses | The lenses are ready to use | Throw away the solution after use.

⚠ WARNINGS

Sterile until first opening | Close the bottle firmly after use | Use the product within 90 days from first opening | Don't freeze, keep away from heat sources | **Keep away from the children's reach** | Do not swallow.

COMPOSITION

Isotonic buffered solution at pH 7.2 containing:
Polyhexamethylene biguanide (0,0001%)
Mirapol A15
Sodium edetate
Methyloxirane polymer
Sodium hyaluronate

BOX CONTENT

1x 250 ml bottle
1x lens case

MEDICAL DEVICE

VERTRIEB / DISTRIBUTION

eyecare company AG
Postfach 501405
50974 Köln
www.eyecare-company.de

eye.CARE
C O M P A N Y

 Schalcon S.p.A
Viale Enrico Ortolani 195
00125 ROMA Italy


eye.care // aqua comfort

Kombilösung mit Natrium-
hyaluronat zur Pflege aller
Arten von Kontaktlinsen

All in one solution with hyaluronic
acid for any kind of contact lenses

AQUA-COMFORT
Mit Hyaluronat für
langen Tragekomfort 

Für sensible Augen geeignet
Suitable for sensitive eyes

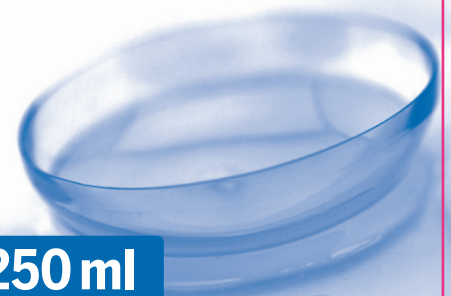

250 ml

eye.CARE
C O M P A N Y

DE

INDIKATION

Kombilösung mit Hyaluronat zum Desinfizieren, Aufbewahren, Reinigen, Benetzen, Abspülen und zum Entfernen von Proteinablagerungen. Für alle Arten von Kontaktlinsen – inklusive Silikon-Hydrogel Kontaktlinsen. Geeignet für sensible und trockene Augen | Enthält einen Behälter.

GEBRAUCHSANWEISUNG

Waschen Sie sich sorgfältig die Hände und trocknen Sie sie ab | Entnehmen Sie die Linse und geben Sie einige Tropfen *eye.care // aqua comfort* auf die Linse und reiben Sie deren Oberfläche | Spülen Sie anschließend die Kontaktlinsen mit *eye.care // aqua comfort* ab, um alle Ablagerungen zu entfernen | Legen Sie die Kontaktlinsen in den Kontaktlinsenbehälter und füllen Sie diesen mit *eye.care // aqua comfort* | Lassen Sie die Kontaktlinsen mindestens 4 Stunden, besser über Nacht, in dem Linsenbehälter | Vor der Entnahme der Linsen den Behälter leicht schütteln | Die Kontaktlinsen können direkt aufgesetzt werden | Schütten Sie die verwendete Lösung in dem Behälter weg.

⚠ WARNHINWEISE

Steril vor dem ersten Öffnen | Nach Gebrauch Flasche sorgfältig schließen | Inhalt innerhalb von 90 Tagen nach dem ersten Öffnen verbrauchen | Nicht einfrieren und Fernhalten vor Wärmequellen | **Für Kinder unzugänglich aufbewahren** | Nicht schlucken.

ZUSAMMENSETZUNG

Isotonisch gepufferte Lösung pH 7.2 enthält:
Polyhexamethylen biguanide (0,0001%)
Mirapol A15
Sodiumedetat
Methyloxiran Polymer
Natriumhyaluronat

INHALT

1x 250 ml Flasche
1x Linsenbehälter

MEDIZINPRODUKT

STERILE A

LOT
EXP Siehe Unterseite
See base



CE
0477

600200_REV03_FOB_20220104



LOT
EXP

DE INDIKATION

Kombilösung mit Hyaluronat zum Desinfizieren, Aufbewahren, Reinigen, Benetzen, Abspülen und zum Entfernen von Proteinablagerungen. Für alle Arten von Kontaktlinsen – inklusive Silikon-Hydrogel Kontaktlinsen. Geeignet für sensible und trockene Augen.

GEBRAUCHSANWEISUNG

Waschen Sie sich sorgfältig die Hände und trocknen Sie sie ab | Entnehmen Sie die Linse und geben Sie einige Tropfen *eye.care // aqua comfort* auf die Linse und reiben Sie deren Oberfläche | Spülen Sie anschließend die Kontaktlinsen mit *eye.care // aqua comfort* ab, um alle Ablagerungen zu entfernen | Legen Sie die Kontaktlinsen in den Kontaktlinsenbehälter und füllen Sie diesen mit *eye.care // aqua comfort* | Lassen Sie die Kontaktlinsen mindestens 4 Stunden, besser über Nacht, in dem Linsenbehälter | Vor der Entnahme der Linsen den Behälter leicht schütteln | Die Kontaktlinsen können direkt aufgesetzt werden | Schütten Sie die verwendete Lösung in dem Behälter weg.

⚠️ WARNHINWEISE

Steril vor dem ersten Öffnen | Nach Gebrauch Flasche sorgfältig schließen | Inhalt innerhalb von 90 Tagen nach dem ersten Öffnen verbrauchen | Nicht einfrieren und Fernhalten von Wärmequellen | **Für Kinder unzugänglich aufbewahren** | Nicht schlucken.

ZUSAMMENSETZUNG

Isotonisch gepufferte Lösung pH 7.2 enthält:
Polyhexamethylen biguanide (0,0001%)
Mirapol A15
Sodiumedetat
Methyloxiran Polymer
Natriumhyaluronat

MEDIZINPRODUKT

eye.care // aqua comfort

Kombilösung mit Natrium-
hyaluronat zur Pflege aller
Arten von Kontaktlinsen

All in one solution with hyaluronic
acid for any kind of contact lenses

AQUA-COMFORT
Mit Hyaluronat für
langen Tragekomfort



250 ml

Für sensible Augen geeignet
Suitable for sensitive eyes

EN INDICATIONS

All in one contact lens solution to disinfect, store, clean, hydrate, lubricate, rinse and remove protein deposits for any kind of contact lenses, silicone hydrogel lenses included. Suitable for sensitive and dry eyes.

INSTRUCTIONS FOR USE

Wash and dry carefully your hands | Remove the lens, put some drops of *eye.care // aqua comfort* solution and rub the lens surface | Rinse the lenses with the solution to remove any deposits | Place the lenses in the lens case and fill it with solution | Let soak contact lenses at least 4 hours or better still overnight | Lightly shake the case before removing the lenses | The lenses are ready to use | Throw away the solution after use.

⚠️ WARNINGS

Sterile until first opening | Close the bottle firmly after use | Use the product within 90 days from first opening | Don't freeze, keep away from heat sources | **Keep away from the children's reach** | Do not swallow.

COMPOSITION

Isotonic buffered solution at pH 7.2 containing:
Polyhexamethylene biguanide (0,0001%)
Mirapol A15
Sodium edetate
Methyloxirane polymer
Sodium hyaluronate

MEDICAL DEVICE

eye.CARE[®]
C O M P A N Y

VERTRIEB / DISTRIBUTION

eyecare company AG
Postfach 501405
50974 Köln
www.eyecare-company.de



Schalcon S.p.A
Viale Enrico Ortolani 195
00125 ROMA Italy

LOT

EXP



CE
0477

STERILE A