

Gebrauchsinformation

Warzenvereiser

Medizinprodukt

 **Lesen Sie vor Gebrauch sorgfältig die Gebrauchsanweisung. Verwenden Sie das Produkt wie angegeben. Wenn es nicht wie angegeben verwendet wird, kann es zu Kälteschäden kommen.**

 **Nicht verwenden, wenn der Spender oder die Verpackung beschädigt ist.**

- ♥ Nur zur äußerlichen Anwendung bestimmt
- ♥ Nur für das Entfernen von Warzen an Händen und Füßen bestimmt sowie von Dellwarzen

Inhalt

- ♥ 38-ml-Spender mit fest angebrachter Applikatorkappe; enthält Dimethylether (DME)
- ♥ Gebrauchsanweisung

Produktbeschreibung

Der Redcare Warzenvereiser ist ein kryochirurgisches Produkt für die Behandlung von gewöhnlichen Warzen und Dornwarzen an Händen und Füßen sowie von Dellwarzen (*Mollescum Contagiosum*). Sie können durch Vereisung (Kryotherapie) entfernt werden.

Erkennen von gewöhnlichen Warzen und Dornwarzen

Warzen sind Hautwucherungen auf der oberen Hautschicht, die von einem Virus, dem sogenannten humanen Papillomavirus (HPV), hervorgerufen werden. Gewöhnliche Warzen treten meist auf der Handrückenseite und in der Nähe der Fingernägel auf. Sie können auch an Ellbogen und Knien auftreten.

Gewöhnliche Warzen sind meist:

- ♥ Rau, hart und haben ein „Blumenkohl-ähnliches“, kuppelförmiges Aussehen
- ♥ Im Allgemeinen nicht schmerzhaft

Dornwarzen treten an der Unterseite der Füße bzw. den Fußsohlen auf. Sie haben manchmal sichtbare dunkle Flecken unterhalb der Warzenoberfläche. Durch den Druck, der beim Stehen und Gehen auf die Dornwarze ausgeübt wird, flacht diese ab, und es bildet sich unter der Hautoberfläche eine harte „Blumenkohl-ähnliche“ Schicht über der Warze.

Dornwarzen

- ♥ Sie können schmerzhaft sein, insbesondere, wenn sie sich an der Ferse oder dem Ballen des Fußes befinden
- ♥ Sie sind kuppelförmig und können durch Stehen/Gehen abflachen

Wenn Sie Zweifel haben, ob es sich tatsächlich um eine Warze handelt, wenden Sie sich bitte an eine Ärztin oder einen Arzt.

Erkennen von Dellwarzen

Dellwarzen sind perlenartige, pinkfarbene runde Warzen, die wie ein Hut aussehen. Sie sind sehr ansteckend und werden von einem Pockenvirus hervorgerufen. Dellwarzen treten in Gruppen und meist am Oberkörper, den Armen und den Beinen auf. Die Größe der Dellwarze reicht von 1mm bis 8mm.

Anwendungsgebiete und Verwendungszweck

Das Produkt ist für das Entfernen von Hautwarzen an Händen und Füßen sowie von Dellwarzen (*Mollescum Contagiosum*) bestimmt. Das Produkt ist ein Medizinprodukt und für die Anwendung bei Personen über 4 Jahren bestimmt.

Gegenanzeigen

Der Redcare Warzenvereiser darf nicht angewendet werden:

- ♥ Wenn eine bestätigte Krebsdiagnose vorliegt und/oder eine Krebsbehandlung erfolgt
- ♥ Für die Behandlung von Genitalwarzen
- ♥ Auf dunkler oder stark pigmentierter Haut
- ♥ Auf Muttermalen, (haarigen) Leberflecken, Schönheitsflecken oder anderen anormal aussehenden Hautauswüchsen
- ♥ Auf gereizter oder entzündeter Haut oder bei Vorhandensein eines Ekzems
- ♥ Im Gesicht
- ♥ Auf empfindlichen Hautbereichen wie am Hals, den Achselhöhlen, der Brust und dem Gesäß
- ♥ Bei unbekannten Hauterkrankungen oder, wenn Zweifel bestehen, dass es sich bei der Hautveränderung um eine Warze handelt
- ♥ Wenn eine Überempfindlichkeit oder Allergie gegen extreme Kälte besteht (Kälteurtikaria)
- ♥ Bei Diabetikern und Personen mit Kreislaufproblemen (Raynaud-Krankheit)
- ♥ Bei Personen unter Immunsuppressiva oder bei einer bestätigten Diagnose einer Autoimmun- oder Bindegewebserkrankung
- ♥ Bei Vorliegen einer HIV-Infektion
- ♥ Bei Personen, die blutgerinnungshemmende Medikamente einnehmen, sowie bei Blutern
- ♥ Bei Kindern unter 4 Jahren
- ♥ In Kombination mit anderen Warzen-entfernenden Produkten

Warnhinweise / Vorsichtsmaßnahmen

- ♥ Hoch entzündlicher Spender. Der Spender steht unter Druck. Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen sowie anderen Zündquellenarten fernhalten
- ♥ Nicht in der Nähe des Warzenvereisers rauchen
- ♥ Nur zur äußerlichen Anwendung bestimmt
- ♥ Nicht durchstechen oder verbrennen, auch nicht nach der Verwendung
- ♥ Nicht gegen offene Flammen oder andere Zündquellen sprühen
- ♥ Den Spender nicht Temperaturen über 50 °C aussetzen
- ♥ Für Kinder unzugänglich aufbewahren
- ♥ Das Spray nicht einatmen
- ♥ Kontakt mit den Augen vermeiden. Nicht in die Augen sprühen, da dies zu Kälteschäden und Blindheit führen kann
- ♥ Die Behandlung nicht häufiger als 4-mal mit Abständen von 2 Wochen zwischen den Behandlungen wiederholen. Wenden Sie sich an eine Ärztin oder einen Arzt, wenn die Warze dann nicht verschwunden ist
- ♥ Das Produkt kann Kälteschäden, Depigmentierung oder Narbenbildung hervorrufen, wenn es nicht gemäß dieser Gebrauchsanweisung angewendet wird
- ♥ Wenden Sie sich an eine Ärztin oder einen Arzt, wenn Sie schwanger sind oder stillen

Letzte Überarbeitung der Gebrauchsanweisung: 03-2021

228562512004

REF 140048 Artikelnummer Utermöhlen 140048 - 740460 Versionsnummer: V1.20251119



Gebrauchsanweisung gewöhnliche Warzen und Dornwarzen

Vorsichtsmaßnahme: Die fest angebrachte Applikatorkappe nicht vom Spender abnehmen.

Größe der Warze	Anzahl Druckstöße auf Spenderunterseite
Kleine Warzen <3 mm	3-mal
Mittelgroße Warzen 3mm bis 5mm	4-mal
Große Warzen > 6 mm	5-mal



1


Halten Sie die Warze nach oben. Platzieren Sie die runde Öffnung der Applikatorkappe direkt über der Warze, sodass sie die Warze umkreist. Vergewissern Sie sich, dass die Kanten des Applikators in engem Kontakt mit der umliegenden Haut sind.



2

Halten Sie den Spender fest über der Warze. Drücken Sie mit dem Daumen abhängig von der Warzengröße 3- bis 5-mal fest auf den Boden des Senders. Siehe Tabelle. Halten Sie den Applikator 10 Sekunden in dieser Position, bevor Sie ihn von der Haut entfernen. Es könnte ein etwa 2mm großer weißer Kreis erscheinen. Eine kleine Narbe ist zu sehen, wenn die Stelle trocknet, diese heilt in den nächsten Tagen und Wochen ab.

10 SEC

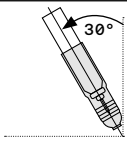

30°

Für eine optimale Behandlung halten Sie den Applikator vertikal, mit einer maximalen Abweichung von 30°.

Vorsichtsmaßnahme: Wenn eine Gruppe von Warzen eng beieinander liegt, sollte jede Warze separat in einem Abstand von 14 Tagen zwischen den Anwendungen behandelt werden.

Vorsichtsmaßnahme: In den meisten Fällen ist eine einzige Behandlung ausreichend, um die Warze zu entfernen. Bei hartnäckigen Warzen können Sie die Behandlung nach 10 Sekunden wiederholen. Wiederholen Sie die Behandlung, wie in dieser Gebrauchsanweisung angegeben, wenn die Warze nicht innerhalb von 14 Tagen verschwunden sein sollte.

Entfernen Sie die Applikatorkappe von der Warze. Gleich nach der Behandlung verspüren Sie möglicherweise eine vorübergehende Hautempfindlichkeit oder ein Kribbeln. Reinigen Sie die Öffnung der Applikatorkappe nach jeder Anwendung mit einem Reinigungstupfer, um das Risiko einer Infektionsübertragung zu verringern. Wenn die Warze nach der Behandlung erhaben und/oder sehr empfindlich ist, sollte sie mit einem oder mehreren Schutzplastern abgedeckt werden.

Gebrauchsanweisung – Dellwarzen

Vorsichtsmaßnahme: Die fest angebrachte Applikatorkappe nicht vom Spender abnehmen.

Warnhinweis: Wenden Sie das Produkt bei einer Dellwarze an und warten Sie 24 Stunden, ob es zu einer Überempfindlichkeit kommt, bevor Sie fortfahren. Behandeln Sie nicht mehr als 2 Dellwarzen am Tag. Behandeln Sie ein Kind nicht, wenn ein Ekzem vorhanden ist.



1


Halten Sie die Warze nach oben. Platzieren Sie die runde Öffnung der Applikatorkappe direkt über der Warze, sodass sie die Warze umkreist. Vergewissern Sie sich, dass die Kanten des Applikators in engem Kontakt mit der umliegenden Haut sind.



2

Halten Sie den Spender fest über der Warze. Drücken Sie mit dem Daumen 3-mal fest auf den Boden des Senders. Halten Sie den Applikator 5 Sekunden in dieser Position, bevor Sie ihn von der Haut entfernen. Es könnte ein etwa 2 mm großer weißer Kreis erscheinen. Eine kleine Narbe ist zu sehen, wenn die Stelle trocknet, diese heilt in den nächsten Tagen und Wochen ab.

5 SEC

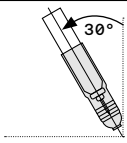

30°

Für eine optimale Behandlung halten Sie den Applikator vertikal, mit einer maximalen Abweichung von 30°.

Vorsichtsmaßnahme: Wenn eine Gruppe von Warzen eng beieinander liegt, sollte jede Warze separat behandelt werden. Warten Sie eine Minute zwischen den Anwendungen, sodass die Applikatorkappe wieder Raumtemperatur erreicht. Behandeln Sie nicht mehr als 2 Dellwarzen am Tag.

Vorsichtsmaßnahme: Wenn viele Dellwarzen eng beieinander liegen, sollte jede Warze separat in einem Abstand von 1 Tag zwischen den Anwendungen behandelt werden.

Entfernen Sie die Applikatorkappe von der Warze. Gleich nach der Behandlung verspüren Sie möglicherweise eine vorübergehende Hautempfindlichkeit oder ein Kribbeln. Wiederholen Sie die Behandlung, wie in dieser Gebrauchsanweisung angegeben, wenn die Dellwarze nicht innerhalb von 14 Tagen verschwunden sein sollte. Reinigen Sie die Öffnung der Applikatorkappe nach jeder Anwendung mit einem Reinigungstupfer, um das Risiko einer Infektionsübertragung zu verringern. Wenn die Dellwarze nach der Behandlung erhaben und/oder sehr empfindlich ist, sollte sie mit einem oder mehreren Schutzplastern abgedeckt werden.

Nach der Behandlung

- ♥ Die Behandlung kann zur Blasenbildung führen. Stechen Sie die Blase nicht ein, wenn dies der Fall ist
- ♥ Die Stelle oder Warze, die behandelt wurde, nicht anpicken oder ankratzen
- ♥ Halten Sie den behandelten Bereich trocken und sauber, um eine Infektion zu vermeiden
- ♥ Sie können wie normalerweise auch schwimmen gehen, sich waschen, Baden und Duschen

Lagerungsbedingungen

- ♥ An einem dunklen und trockenen Ort aufbewahren. Eine Lagertemperatur von 25°C darf nicht überschritten werden
- ♥ Entsorgen Sie den Inhalt/Behälter entsprechend den lokalen Vorschriften



Mögliche Nebenwirkungen

- ♥ Die Kryotherapie kann Hypopigmentierung (helle Flecken) oder Hyperpigmentierung (dunkle Flecken) hervorrufen. Diese verschwinden im Laufe der Zeit wieder
- ♥ Blutung
- ♥ Blasenbildung
- ♥ Narbenbildung, wenn die Vereisung länger als angegeben erfolgt
- ♥ Vorübergehende Beschwerden, wie Schmerzen oder Kribbeln
- ♥ Wenden Sie sich bei einer Infektion und/oder Komplikationen an eine Ärztin oder einen Arzt

Reklamationen und Kundendienstunterstützung

Wenn Sie Fragen haben oder das Produkt reklamieren wollen, wenden Sie sich an:

Shop-Apotheke B.V.
Erik de Rodeweg 11/13
NL-5975 WD Sevenum
kontakt@shop-apotheke.com
www.shop-apotheke.com

Alle schwerwiegenden unerwünschten Ereignisse im Zusammenhang mit diesem Produkt müssen dem Hersteller Koninklijke Utermöhlen NV und der nationalen Gesundheitsbehörde in Ihrem Land gemeldet werden.



Hersteller:
Koninklijke Utermöhlen NV
De Overweg 1
NL-8471 ZA Wolvega



Vertrieb:
Shop-Apotheke B.V.
Erik de Rodeweg 11/13
NL-5975 WD Sevenum

