

**Frei von
Nonoxynol-9!**



Caya[®] diaphragm gel

Kontrazeptives Gel zur Anwendung mit Diaphragmen und Portio-Kappen aus Naturkautschuklatex oder Silikon

Indikation

Caya[®] Gel ist ein kontrazeptives Gel zur Anwendung mit den Barriereverhütungsmitteln Diaphragma und Portio-Kappe. Caya[®] Gel erhöht die Sicherheit dieser Verhütungsmethoden. Die Anwendung ohne ein kontrazeptives Gel ist nachweislich weniger sicher.

Wirkungsweise

Caya[®] Gel bildet mittels der Zellulose (Gelbildner) eine zusätzliche physikalische Barriere vor dem Muttermund und senkt den pH-Wert der Scheidenflüssigkeit. Der erhöhte Säuregrad und die Viskosität des Gels haben einen motilitätshemmenden Effekt auf die Spermatozoen.

Anwendung

Vor dem Einführen in die Scheide wird etwa ein Teelöffel (ca. 4 ml) Caya[®] Gel in die Membran des Diaphragma oder der Portio-Kappe gegeben. Hierbei sollte die jeweilige Gebrauchsanweisung beachtet werden. Der Vaginalapplikator wird optional benutzt, falls bei erneutem Verkehr zusätzlich Gel vor das bereits liegende Diaphragma (z.B. das neue Caya[®] contoured diaphragm, PZN 09224698) eingebracht werden soll. Der Vaginalapplikator kann mehrfach benutzt werden, sollte jedoch nach jedem Gebrauch mit warmen Wasser gereinigt werden.

Kontraindikationen

Es liegen keine Rückmeldungen zu Unverträglichkeiten vor. Sollten Beeinträchtigungen auftreten, beenden Sie den Gebrauch von Caya[®] Gel und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker.

Hinweis

Caya[®] Gel:

- bietet **KEINEN** Schutz vor sexuell übertragbaren Krankheiten.
- ist **KEINE** sichere Verhütungsmethode, wenn als Verhütungsgel allein, ohne Barriereverhütungsmittel, angewandt
- ist wasserlöslich und verträglich mit Kondomen aus Naturkautschuk oder Polyurethan.

Caya[®] Gel ist identisch mit dem von 1972 bis 2002 hergestelltem Contracep[®] grün sowie dem seit 2005 erhältlichen ContraGel[®] grün. Diese Zusammensetzung auf Milchsäurebasis wurde bereits 1989 (Dittrich 1989) in einer vergleichenden Studie verschiedener Diaphragmengen und -Cremes als ebenso sicher bewertet wie Nonoxynol-9-haltige Produkte, allerdings mit deutlich geringerem Nebenwirkungspotenzial.


Inhaltsstoffe

Wasser, Milchsäure, Natriumlactat, Zellulose, Sorbinsäure

Inhalt:

60 gr Gel mit Vaginalapplikator
enthält kein Nonoxynol-9

Lagerung

Kühl und trocken lagern. 4°C  25°C

Tube immer geschlossen halten.

Nach dem Öffnen innerhalb von 3 Monaten verbrauchen.

Erhältlich in Apotheken oder im Fachhandel.

PZN 02950119

EAN 4013273001250

 DeltaMed GmbH
Raiffeisenstr. 8a
61169 Friedberg
Deutschland

 0124

Medizinprodukt
Made in Germany



weltweite Vertriebsrechte:

KESSEL medintim GmbH
Kelsterbacher Straße 28
64546 Mörfelden-Walldorf, Germany

Tel. (06105) 20 37 20
Fax (06105) 45 59 01
E-Mail: service@medintim.de

www.caya.eu