

**PolySpray®** besteht aus wasserlöslichen Bestandteilen, die sich gut zur hygienischen Wundreinigung eignen. Dank der flüssigen, nicht fettenden Darreichungsform können auch größere Wundflächen mit wenig Aufwand gereinigt werden. Schmutz, abgestorbene Zellen, Fettpartikel und Talgreise werden beseitigt, wodurch Bakterien und Hefen die Nahrungsgrundlage entzogen wird.

### **Zusammensetzung:**

Aqua, Polyhexanid, Undecylenamidopropyl Betaine, Denatoniumbenzoat

### **Anwendung:**

Die Lösung 2 x täglich auf die betreffenden Hautpartien aufsprühen. Nicht ausspülen!

Bei starken Verschmutzungen sollte die Anwendung zunächst mehrmals täglich (3-5 x) wiederholt werden.

### **Hinweise:**

Nur für die äußere Anwendung. Augenkontakt vermeiden. Bei Kontakt mit den Augen mit reichlich Wasser spülen.

**Haltbarkeit:** 48 Monate

### **Handelsform:**

50 ml Pumpspray



**Polyhexanid** reduziert die Belastung durch eine veränderte Hautflora bereits in sehr niedrigen Konzentrationen.

Es ist besonders hautverträglich.

**Undecylenamidopropyl-Betain** ist ein besonders hochwertiges Tensid, das Biofilme auf der Haut degradiert. Es ergänzt sich in seiner Wirkung mit dem Polyhexanid.

**Denatoniumbenzoat** verhindert als Bitterstoff das Ablecken des Produkts.

