


Prävention

Fußpflege und die korrekte Nagelform sowie das Tragen bequemer Schuhe mindern das Risiko eingewachsener Zehennägel.

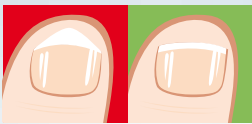

Richtige Fußpflege und **korrekte Nagelform** (Zehennägel gerade schneiden, sodass die Seitenkanten des Fußnagels über das Nagelbett hinausragen) verringern das Risiko, dass sich die Ecken des Nagels in das Nagelbett bohren.



Bequeme, nicht einengende oder **offene Schuhe** zu tragen reduziert den Druck, der auf den Zehennagel einwirkt.

Selbstbehandlungsmöglichkeiten

Bei gängigen Behandlungsmethoden wie mit der Schere, Nagelfeile, Pinzette, Nadel und / oder Watte kann **erhöhte Verletzungsgefahr** bestehen und das Risiko, das Leiden weiter zu verschlimmern. Andere Methoden, wie beispielsweise das Tragen von Nagelhauben, schützen den Nagel zwar gegen Stöße, lösen aber nicht das Problem.

Das Scholl Eingewachsene Zehennägel Komplett Set ist die **einfache** und **professionelle Lösung für zu Hause**.

Scholl Eingewachsene Zehennägel Komplett Set

Die einfache und professionelle Lösung für zu Hause bei eingewachsenen Zehennägeln.



- ▶ Beruhigender Kühleffekt
- ▶ Fördert ein gerades Herauswachsen des Nagels
- ▶ Einfache und sichere Anwendung, lindert Schmerzen

Weitere Informationen und hilfreiche Tipps finden Sie in unserem Anwendungsvideo:



EINGEWACHSENE ZEHENNÄGEL?



Scholl bietet die einfache und professionelle Lösung für zu Hause.

Scholl Eingewachsene Zehennägel Komplett Set

- Einzigartiges 2-Stufen-System
- Zusammen mit Fußpflege-Spezialisten entwickelt
- Kann mit Schuhen und Socken getragen werden



Reckitt Benckiser
Deutschland GmbH
Darwinstraße 2-4
D-69115 Heidelberg
Tel.: +49 6221 9982-570
www.scholl-fusspflege.de

Reckitt Benckiser
Austria GmbH
Guglgasse 15
AT-110 Wien
Tel.: +43 1 74003-700
www.scholl.at

Reckitt Benckiser
Switzerland AG
Richtstrasse 5
CH-8304 Wallisellen
Tel.: +41 844 84 84 90
www.scholl-schweiz.ch



NEU

Ursachen

Eingewachsene Zehennägel können verschiedene Ursachen haben:



Veranlagung
(z. B. zu breites
Nagelbett)



Sport-
verletzungen



Falsches
Nagelschneiden



Enge
Schuhe

Symptome

Eingewachsene Zehennägel betreffen meist den großen Zeh und können starke lokale Schmerzen verursachen.

Stadien und Behandlungsmöglichkeiten



1 – 3 Tage

Druck, Unbehagen und
leichter Schmerz



3 – 5 Tage

Steigender Schmerz,
Rötung und Schwellung



5 – 8 Tage +

Infektion
(oft eitrig)


Selbstbehandlung
möglich


Behandlung durch
Arzt oder Podologen

Die Lösung von Scholl

Scholl Eingewachsene Zehennägel Komplett Set

Die einfache und professionelle Lösung für zu Hause bei eingewachsenen Zehennägeln.



- ▶ Sorgt für beruhigenden Kühleffekt
- ▶ Hebt Nagelränder an und lindert Schmerzen
- ▶ Verhindert Einwachsen des Nagels
- ▶ Lässt Nagel gerade herauswachsen
- ▶ Verletzt die Haut nicht
- ▶ Gemeinsam mit Fußpflege-Spezialisten entwickelt

Inhalt:

22 ml kühlendes Spray
10 Zehennagel-Aufrichtungsclips
8 ml Nagelkleber

Clips können in Schuhen und Socken,
nachts und unter der Dusche getragen
werden.



- ✓ **Produkt geeignet** bei leicht eingewachsenen Zehennägeln.
Anzeichen: Rötung, Schmerzempfindlichkeit, Schwellung.
- ✗ **Produkt nicht geeignet** bei stark eingewachsenen/gerollten Nägeln.
Anzeichen: Nagel hat Haut durchstoßen, Blut, Eiter.

Anwendung



Der Clip kann angewendet werden, wenn der freie Rand
des betroffenen Nagels mindestens 2 mm lang ist.

Schritt 1: Verwenden des kühlenden Sprays



- Betroffenen Nagel reinigen und trocknen (gegebenenfalls Nagellack entfernen).
- Spray vor der Verwendung schütteln, aus 10 cm Entfernung auf den betroffenen Nagelbereich und die umgebende Haut sprühen. Mindestens 1 Minute trocknen lassen.
- Spray kann bis zu 5 Mal am Tag angewendet werden, um Beschwerden zu lindern (mindestens 1 Stunde Pause zwischen den Anwendungen).

Schritt 2: Verwenden des Zehennagel-Aufrichtungsclips



- Mit dem Pinsel eine dünne Nagelkleberschicht am Rand des betroffenen Nagels auftragen.
- Clip am Nagel anbringen: zuerst das eine Häkchen des Clips unter dem Nagelrand einhaken und an die Seite des Nagelrands schieben, dann das zweite Häkchen einhaken.
- Sicherstellen, dass die Häkchen an beiden Seiten eingehakt sind.
- Clip sanft andrücken und halten, bis der Kleber trocken ist.

Entfernen des Zehennagel-Aufrichtungsclips

- Clip nicht abreißen oder abziehen.
- Clip kann mit Nagellackentferner (nicht im Set enthalten) einfach abgelöst werden: Wattepad in Nagellackentferner tränken und am Clip anwenden, bis er sich ablöst.
- Entfernte Clips nicht wiederverwenden.

Anwendungsdauer

Die durchschnittliche Anwendungsdauer beträgt 6 Wochen, bis der Nagel gerade herausgewachsen ist. Wir empfehlen, den Clip aus Hygienegründen **einmal wöchentlich** zu wechseln.

NICHT geeignet für stark belastende Aktivitäten (z.B. Sport): Clip vor derartigen Aktivitäten entfernen und anschließend neuen Clip anbringen.